

【メモリアシスト（携帯アプリ版）手引き】目次

I. 使用マニュアル

- (1) 「手順支援」機能の使い方
- (2) 「スケジュール」機能の使い方
- (3) 「アラーム」機能の使い方

II. データ編集マニュアル


- (1) 「手順支援」編集のしかた
 - a. 追加（新規登録）
 - ①グループを追加する
 - ②手順名称を追加する
 - ③詳細手順を追加する
 - i. メモをつける
 - ii. 画像をつける
 - iii. 音声（動画）をつける
 - b. 編集（変更）
 - c. 削除
 - d. 移動
 - e. カメラ手順編集（自動登録）
- (2) 「スケジュール」編集のしかた
 - a. 追加（新規登録）
 - b. 編集（変更）
 - c. 削除
 - d. 全削除
 - e. 複写
 - f. 全複写
 - g. 過去のスケジュール整理（消去）
 - h. 週間スケジュール
- (3) 「アラーム」編集のしかた
 - a. 追加（新規登録）
 - b. 編集（変更）
 - c. 削除
 - d. 複写

- e. 全複写
 - f. 過去のアラーム整理 (消去)
 - g. 週間アラーム
- (4) 「送信先登録」のしかた

I. 使用マニュアル

(1) 「手順支援」機能の使い方

1. 手順支援の起動

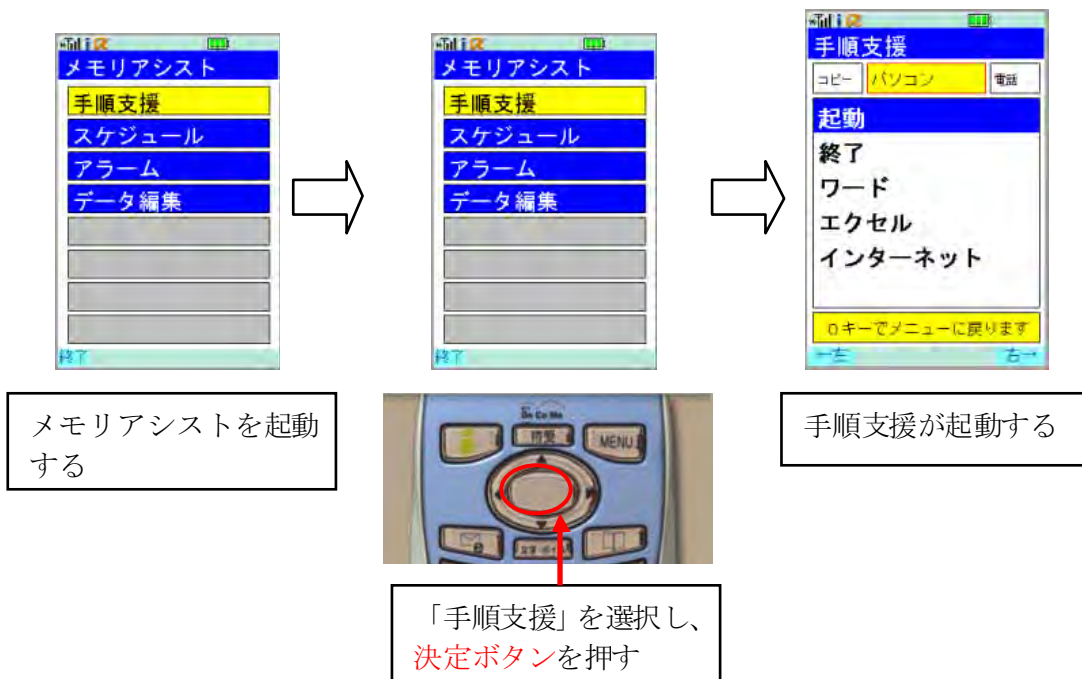

2. インデックスの選択



3. 手順の選択・決定

手順支援

電話 コピーをとる パソコン

拡大コピー

片面→両面コピー
ソート (仕分け)

○キーでメニューに戻ります

←左 右→

上下ボタンで行いたい手順を選択する

決定ボタンを押す

4. 詳細手順の表示

手順名称を選択し**決定ボタン**を押すと、下のような画面のどちらかが表示される

<イメージ表示なし>




<イメージ表示あり>



決定ボタン：次の詳細手順に進む

上ボタン：前の手順を確認
下ボタン：次の手順を確認


5. 詳細手順メモ機能

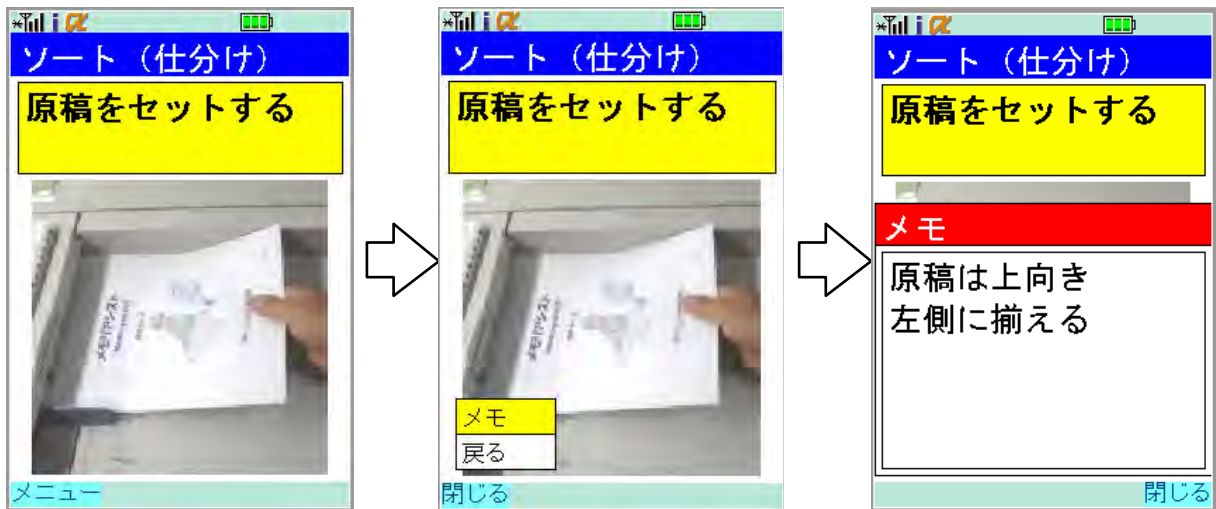

詳細手順画面で左上ボタンを押す



「メモ」を選択し
決定ボタンを押す

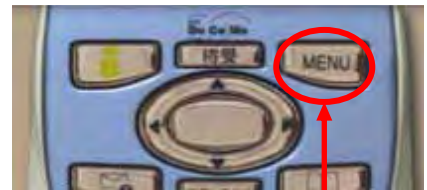

右上ボタンを押すとメモ表示
が消え、詳細手順画面に戻る


6. 音声(動画)再生機能

詳細手順に音声(動画)が付けられていると、「音声」が表示される。



右上ボタンを押すと動画
(音声)が再生される

7. インデックス選択画面に戻る

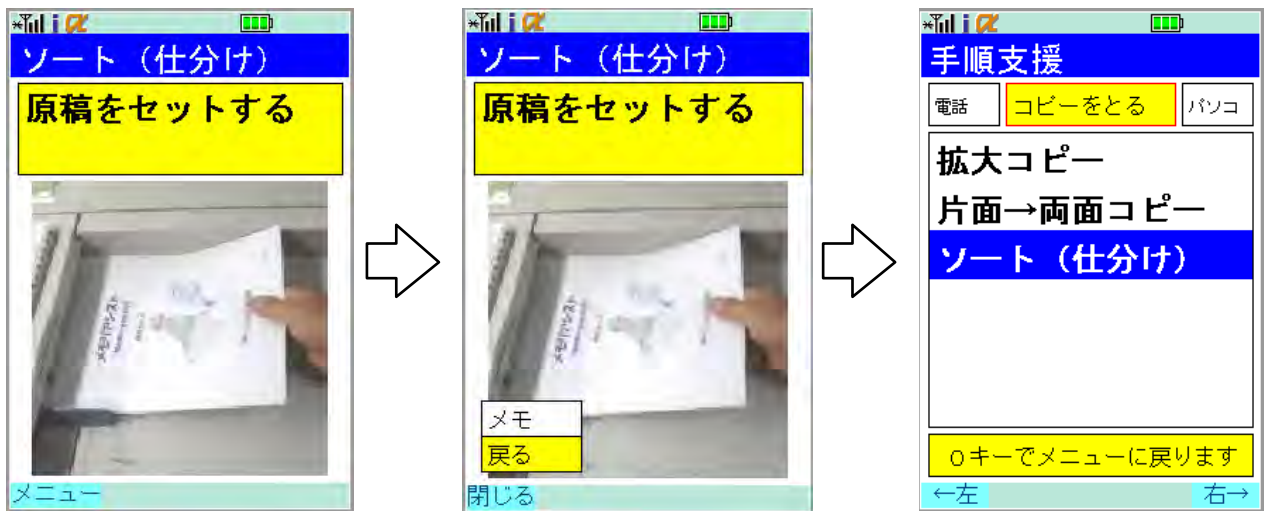

詳細手順画面で左上ボタンを押す





「戻る」を選択し、決定ボタンを押す

インデックス選択画面に戻る

8. 詳細手順の終了



最終手順終了後に決定ボタンを押す

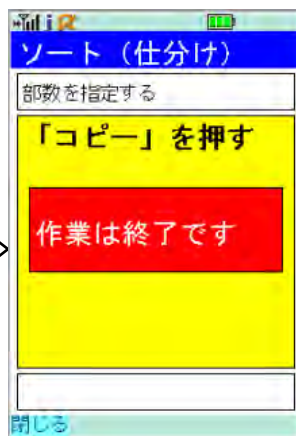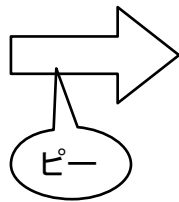

ピープ音が出た後、「作業は終了です」というメッセージが5秒間画面上に表示される

その後、「2. インデックスの選択」の画面に戻る

(2) 「スケジュール」機能の使い方

1. スケジュールの起動

The diagram illustrates the process of starting the schedule function through three sequential screenshots and two physical button press photos:

- Step 1:** The first screenshot shows the 'メモリアシスト' (Memory Assistant) menu with 'スケジュール' (Schedule) highlighted in yellow.
- Step 2:** The second screenshot shows the same menu, but 'スケジュール' is now highlighted in blue, indicating it has been selected.
- Step 3:** The third screenshot shows the schedule screen for '2009年11月12日 (木)'. The current schedule item is '昼食' (Lunch) from 12:15-13:00, highlighted in yellow. Below it, a blue bar indicates 'あと31分です' (31 minutes remaining).

Two photos of the physical device show the button presses:

- The first photo shows the '決定' (Enter) button being pressed, with a red circle around it and an arrow pointing to the text: 「メモリアシストを起動し、**下ボタン**を押す」 (Start Memory Assistant and press the **down button**).
- The second photo shows the '決定' (Enter) button being pressed again, with a red circle around it and an arrow pointing to the text: 「「スケジュール」を選択し、**決定ボタン**を押す」 (Select 'Schedule' and press the **enter button**).

A text box on the right states: 「スケジュールが起動する」 (Schedule starts).


2. スケジュール表示の見方

The diagram explains the layout of the schedule screen and the corresponding physical buttons:

- Screen Layout:** The screen shows a list of tasks: 'コピーをとる' (Copy), '昼食' (Lunch) with time '12:15-13:00', 'あと31分です' (31 minutes remaining), '薬を飲む' (Take medicine), and 'Oキーでメニューに戻ります' (Press O key to return to menu). Navigation buttons '前日' (Yesterday) and '翌日' (Tomorrow) are at the bottom.
- Annotations:** Red arrows point from text boxes to specific parts of the screen:
 - '一つ前のスケジュール' (Previous schedule) points to 'コピーをとる'.
 - '現在のスケジュール' (Current schedule) points to '昼食'.
 - '現在のスケジュール終了までの残り時間' (Remaining time until current schedule ends) points to 'あと31分です'.
 - '次のスケジュール (現在のスケジュールが終了すると、中央に表示される)' (Next schedule (displayed in the center when the current schedule ends)) points to '薬を飲む'.
- Physical Buttons:** A photo of the device shows three buttons circled in red:
 - 右上ボタン (Right Top Button):** 詳細手順を表示する (Display detailed procedure).
 - 上ボタン (Up Button):** 前の手順を確認する (Check previous procedure).
 - 下ボタン (Down Button):** 後ろの手順を確認する (Check next procedure).

(3) 「アラーム」機能の使い方

1. アラームの起動

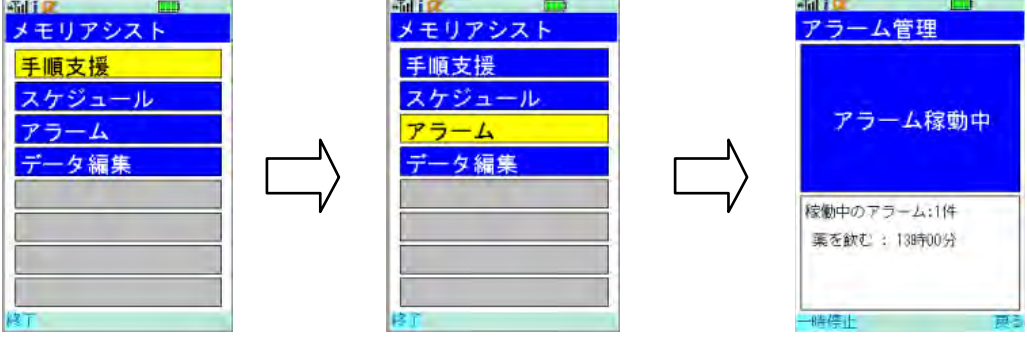


アラームが起動する

メモリアシストを起動し、**下ボタン**を押す

「アラーム」を選択し、**決定ボタン**を押す

2. アラーム表示の見方

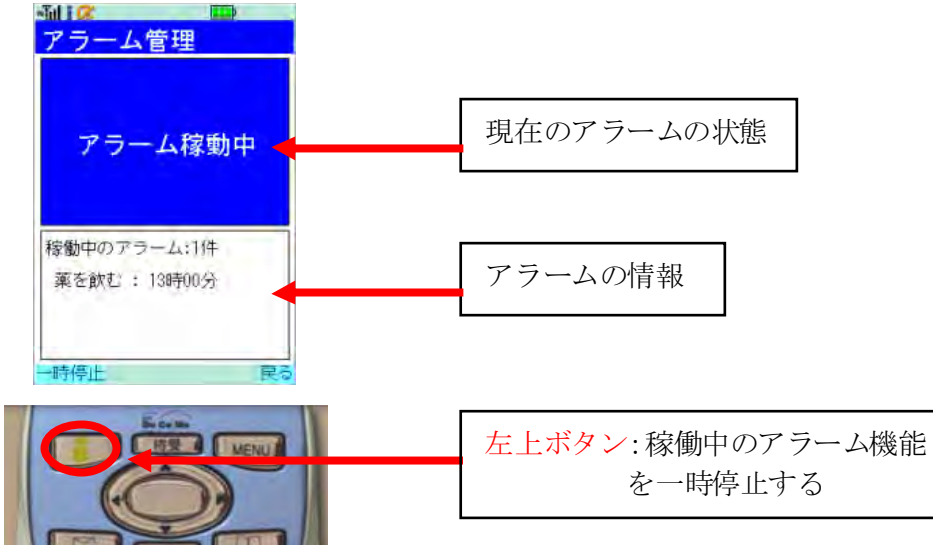

現在のアラームの状態

アラームの情報


左上ボタン:稼働中のアラーム機能を一時停止する

3. アラーム稼働中の表示



4. アラームの後回し

「3. アラーム稼働中の表示」で**右上ボタン**を押し、「後で行う」を選択するとこの画面が表示される。

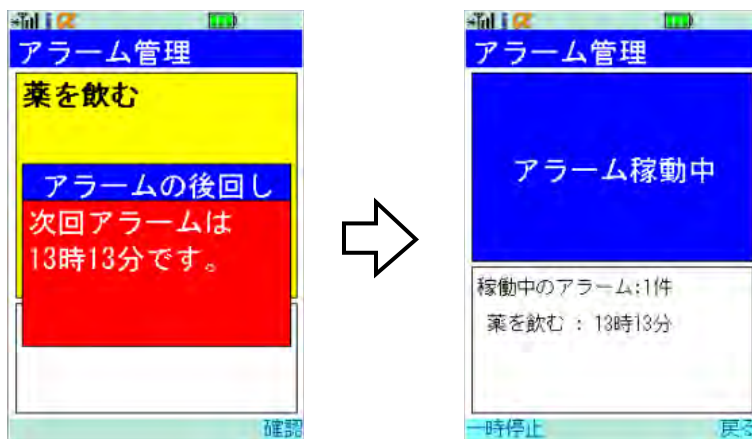

アラームの後回し画面は 5 秒間表示された後、自動的に消える

II. データ編集マニュアル

(1) 「手順支援」編集のしかた

a. 追加（新規登録）

ここでは「電子レンジでホットミルクを作る」という手順を設定する。





1. 手順編集の起動

① 下ボタンを押し「データ編集」を選択する

② 決定ボタンを押す

③ 「手順編集」を選択し決定ボタンを押す

2. グループを追加する

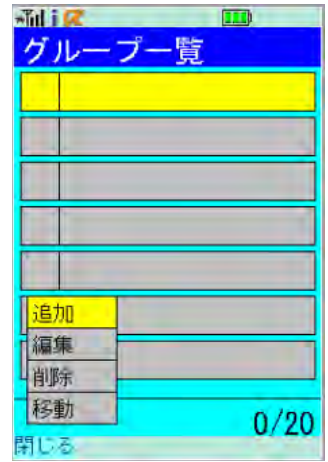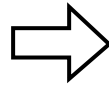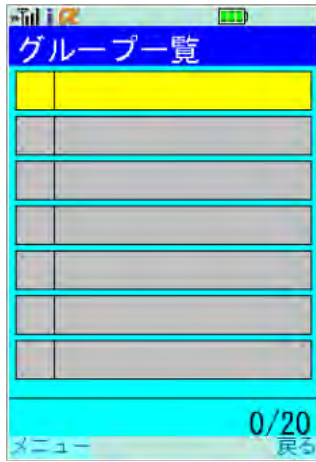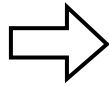




最初に設定する場合「グループがありません」と表示されるので、**左上ボタン**を押す



左上ボタンを押してメニューを開く



「追加」を選択し **決定ボタン**を押す

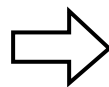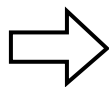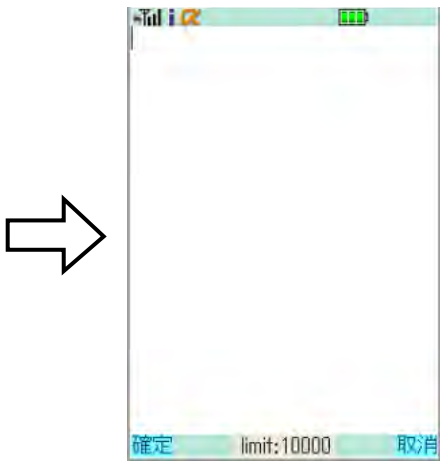

文字キーでグループ名を入力








入力が終わったら **決定ボタン**を押す



入力内容が反映されるので、**決定ボタン**を押して次の操作へ

3. 手順名称を追加する

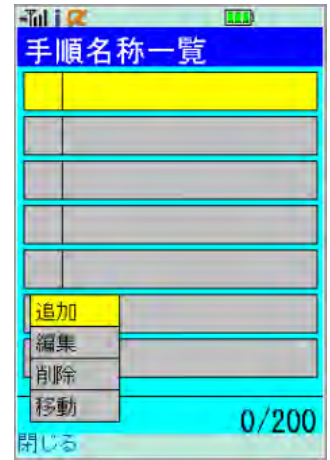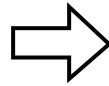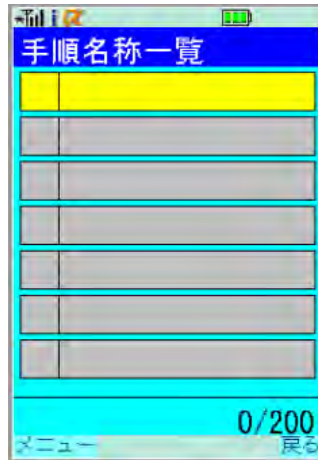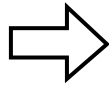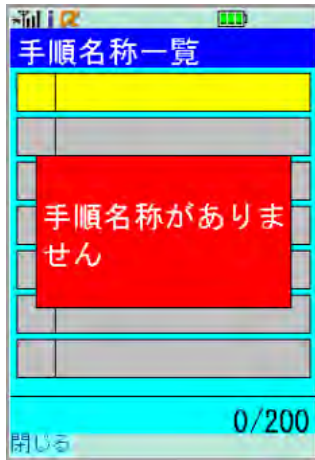




最初に設定する場合「手順名称がありません」と表示されるので、**左上ボタン**を押す



左上ボタンを押してメニューを開く



「追加」を選択し、**決定ボタン**を押す

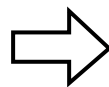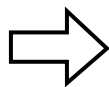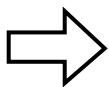

文字キーで手順名称を入力








入力が終わったら**決定ボタン**を押す




入力内容が反映されるので、**決定ボタン**を押して次の操作へ

4. 詳細手順を追加する

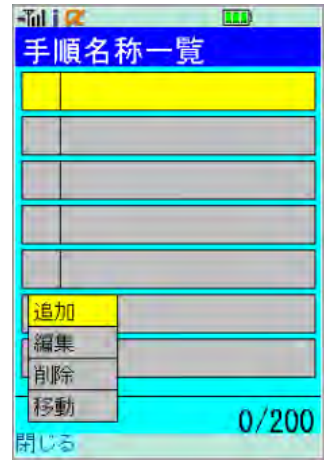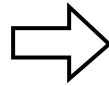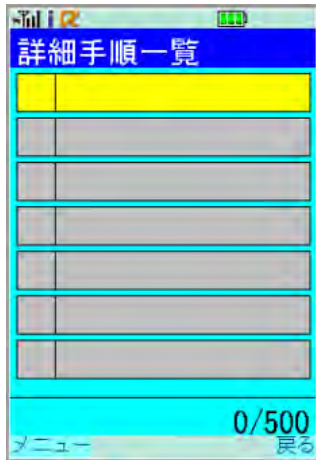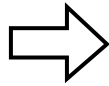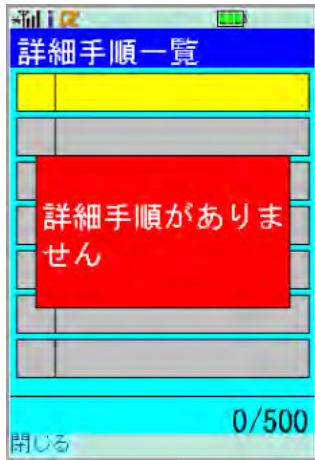





最初に設定する場合「詳細手順がありません」と表示されるので、**左上ボタン**を押す

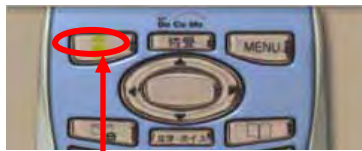

左上ボタンを押してメニューを開く



「追加」を選択し、**決定ボタン**を押す

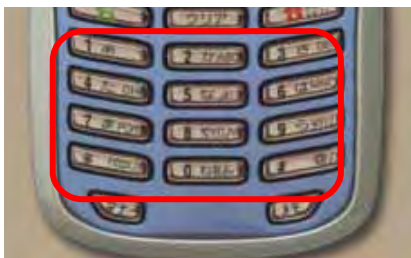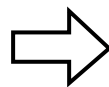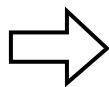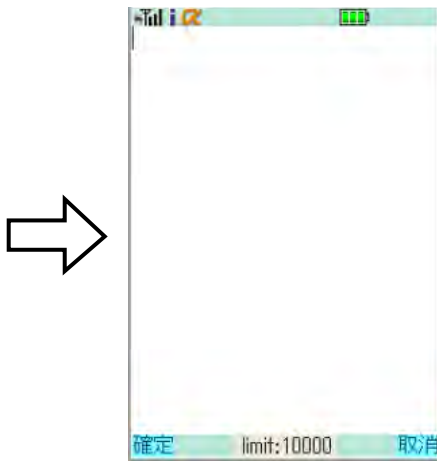

文字キーで詳細手順を入力







入力が終わったら**決定ボタン**を押す



入力内容が反映されるので、**下ボタン**を押して次の操作へ

5. 設定した手順の保存 (必須)

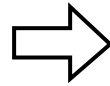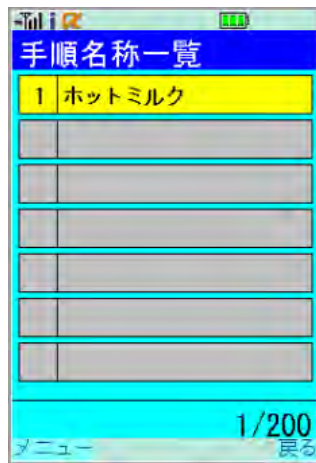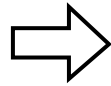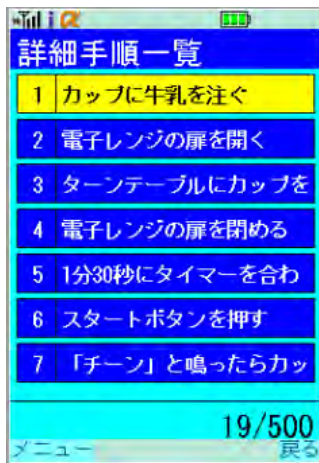



4. の操作を繰り返し、
全ての手順を入力したら
右上ボタンを押す



「手順名称一覧」に戻っ
たら右上ボタンを押す





「グループ一覧」に戻っ
たら右上ボタンを押す

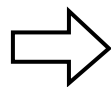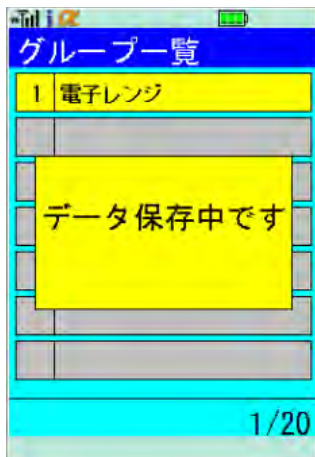

「データ保存中です」と数秒表示された後、
自動的に初めの画面に戻る

5 - i. メモをつける

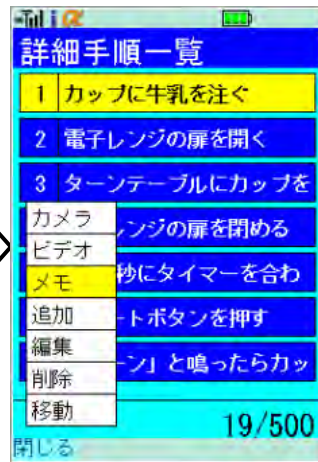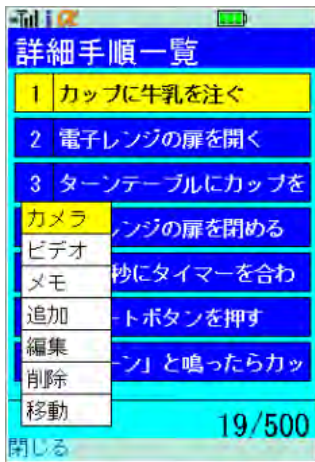

メモをつけたい手順を選び、左上ボタンを押しメニューを開く





「メモ」を選択し決定ボタンを押す



文字キーでメモを入力



入力内容を確認し、左上ボタンを押して登録する

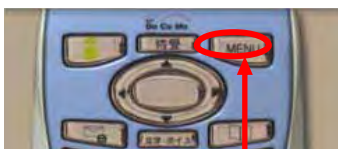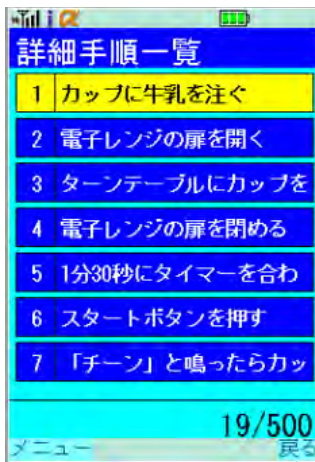

右上ボタンを押す




右上ボタンを押す



右上ボタンを押す

自動的に初めの画面に戻る

5 - ii. 画像をつける

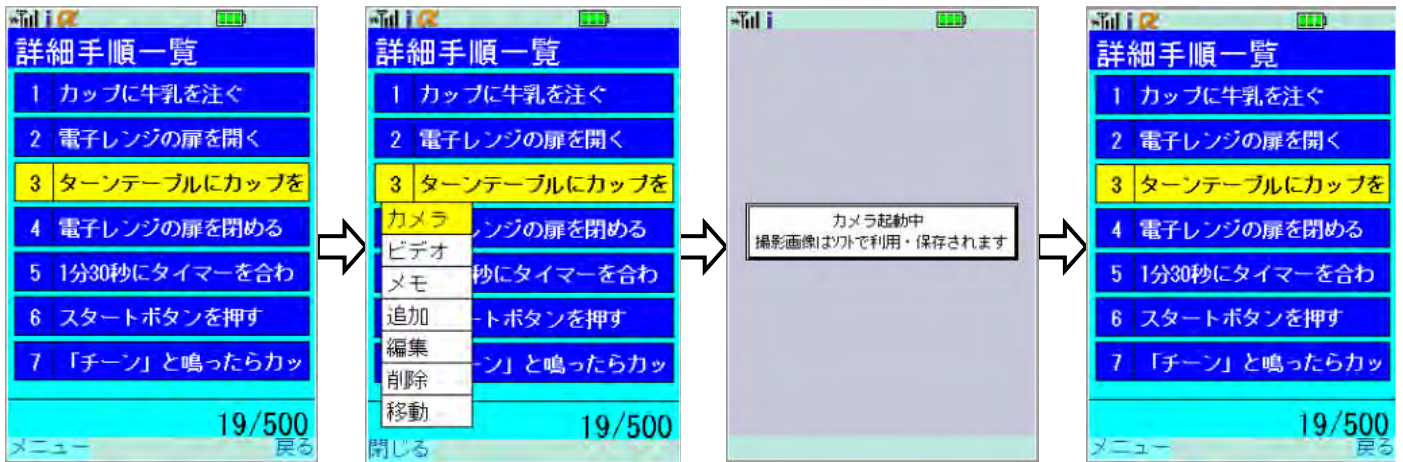

画像をつけたい手順を選び、**左上ボタン**を押しメニューを開く



「カメラ」を選択して**決定ボタン**を押す



自動的にカメラが起動するので**決定ボタン**で写真を撮る



詳細手順一覧に戻るの**右上ボタン**を押す



右上ボタンを押す



右上ボタンを押す



自動的に初めの画面に戻る

5 - iii. 音声（動画）をつける

1 カップに牛乳を注ぐ
2 電子レンジの扉を開く
3 ターンテーブルにカップを
4 電子レンジの扉を閉める
5 1分30秒にタイマーを合わ
6 スタートボタンを押す
7 「チーン」と鳴ったらカッ

19/500

カメラ
ビデオ
メモ
追加
編集
削除
移動

カメラ起動中
撮影画像はカメラで利用・保存されます

音声をつけたい手順を選び、左上ボタンを押しメニューを開く

下ボタンを押して「ビデオ」を選ぶ

決定ボタンを押す

自動的にカメラが起動する

音声録音(動画撮影)・シャープ製端末以外の場合

00:00:28


MENU 撮影

MENU 保存 再生

決定ボタンを押して撮影を開始し、決定ボタンを押して撮影を終了する

決定ボタンを押して保存する

音声録音・シャープ製端末の場合

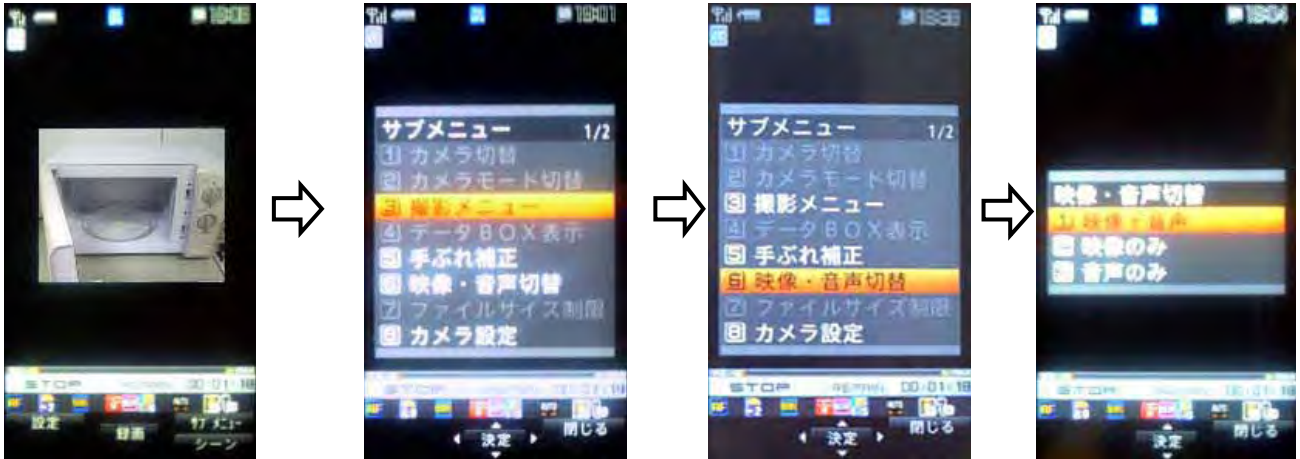

右上ボタンを押してメニューを開く




下ボタンを押して「映像・音声切替」を選ぶ



決定ボタンを押す



下ボタンを押して「音声のみ」を選ぶ

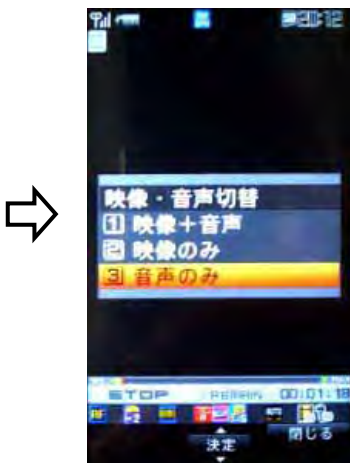



決定ボタンを押す



音声録音画面になるので、決定ボタンを押して撮影を開始し、決定ボタンを押して撮影を終了する



自動的にメニューが表示されるので、決定ボタンを押して保存する

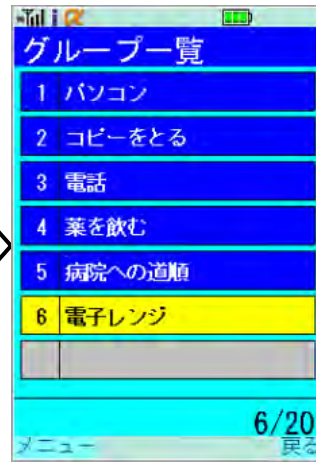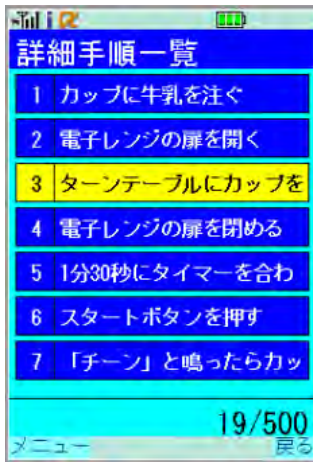

自動的に初めの画面
に戻る


詳細手順一覧に戻るの
で右上ボタンを押す

右上ボタンを押す

右上ボタンを押す

b. 手順の編集 (変更)

ここではグループ名を編集する (手順名称・詳細手順も同様の方法で編集を行う)。

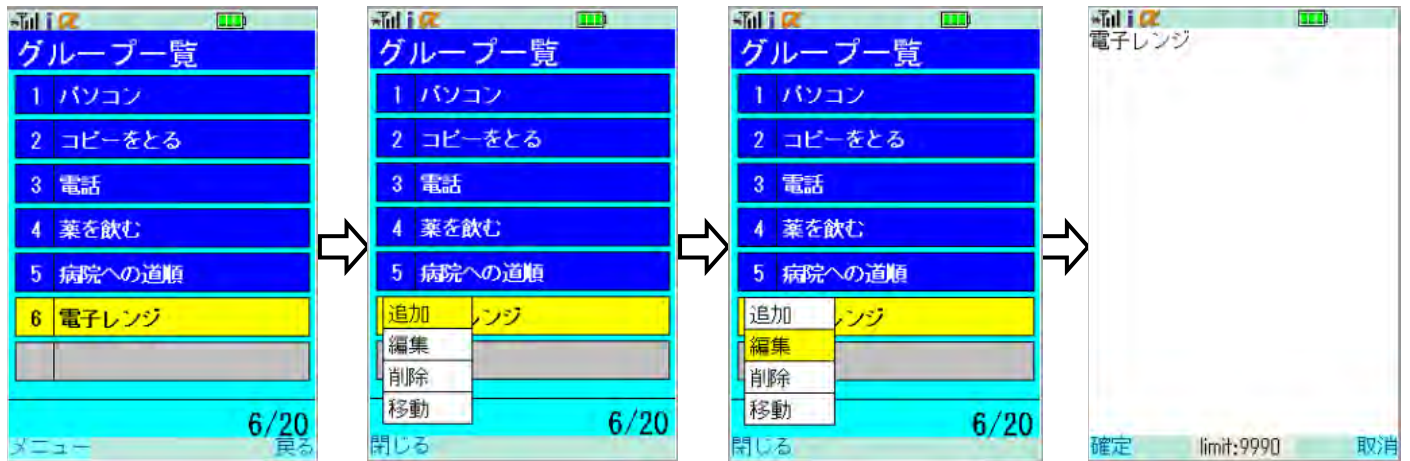


編集したいものを選び、**左上ボタン**を押してメニューを開く



下ボタンを押して「編集」を選ぶ




決定ボタンを押す

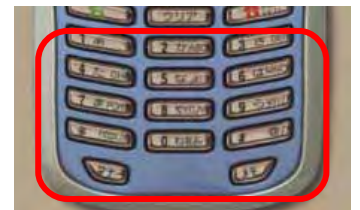

文字入力画面が開くので、**文字キー**で変更内容を入力する



入力内容を確認し、**決定ボタン**を押す

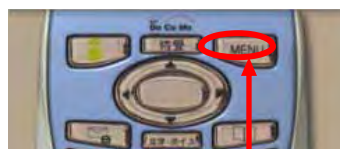


右上ボタンを押す




自動的に初めの画面に戻る

c. 手順の削除

ここでは手順名称を削除する（グループ・詳細手順も同様の方法で削除を行う）。

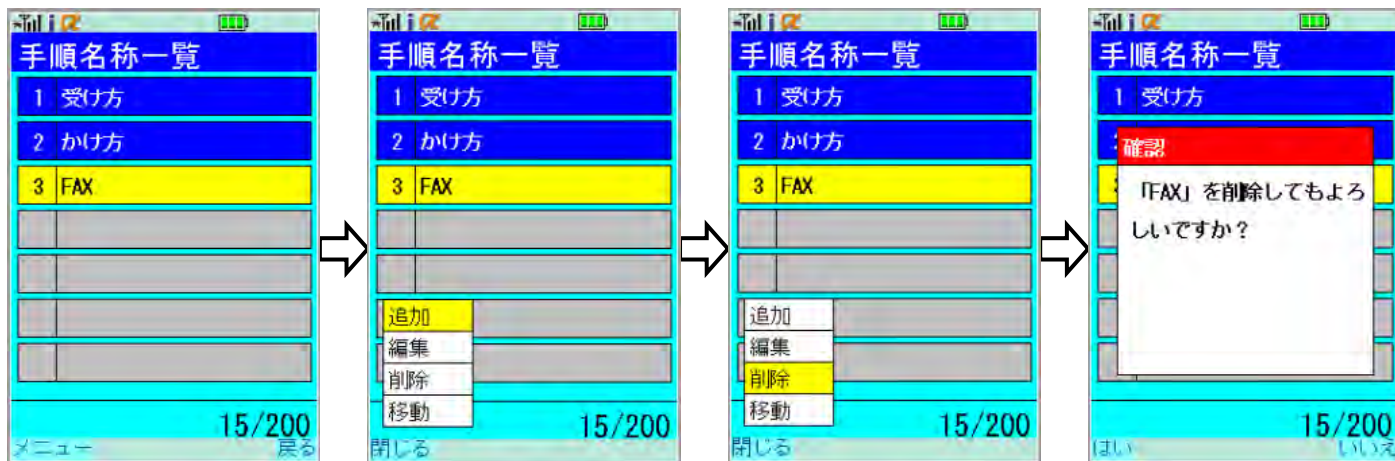


削除したいものを選び、左上ボタンを押してメニューを開く

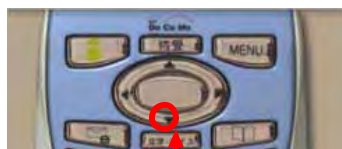


下ボタンを押して「削除」を選ぶ




決定ボタンを押す

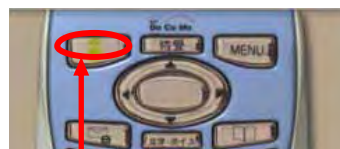

確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す

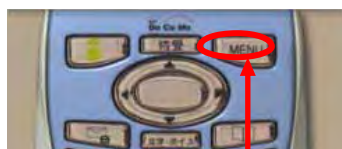

削除されていることを確認し、右上ボタンを押す

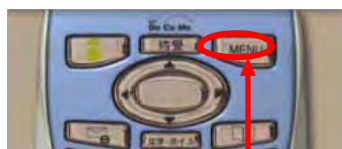


右上ボタンを押す

自動的に初めの画面に戻る

d. 手順の移動

ここではグループ名称を移動させる（手順名称・詳細手順も同様の方法で移動する）。

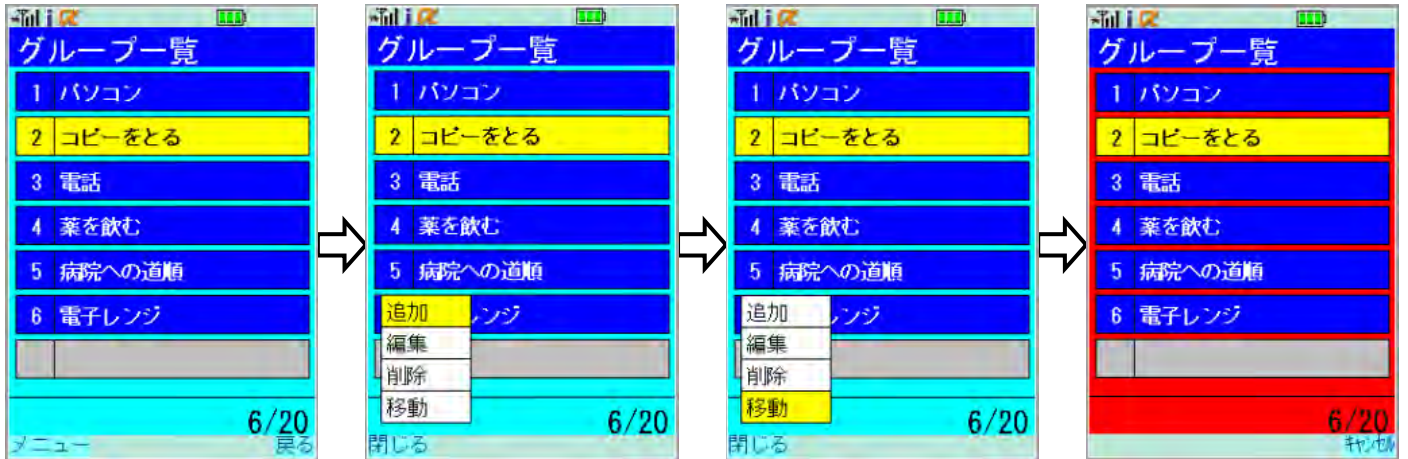

移動させたいものを選び、左上ボタンを押してメニューを開く




下ボタンを押して「移動」を選ぶ




決定ボタンを押す



上下ボタンを押し、移動させる位置を選択する

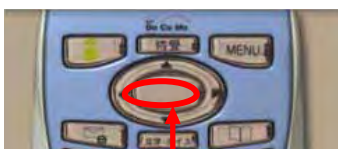

希望の場所に移動させたら、決定ボタンを押す

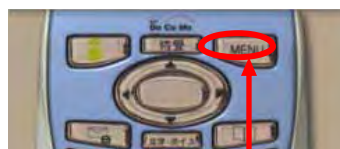


右上ボタンを押す



自動的に初めの画面に戻る

e. カメラ手順編集（自動登録）

ここではカメラ手順編集機能を利用して、新規の手順を自動で追加し、複数の画像付き詳細手順を連続して設定する。

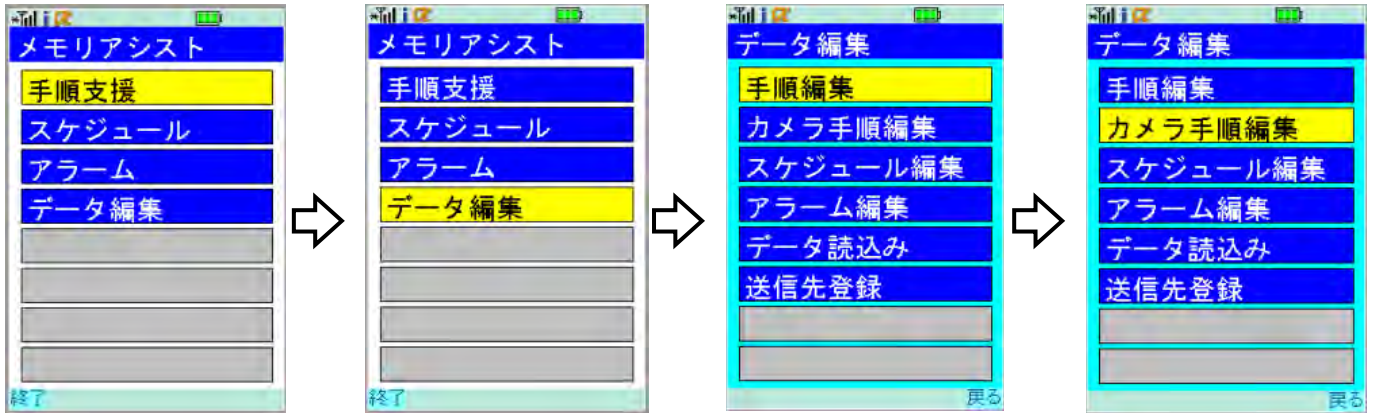

① 下ボタンを押し「データ編集」を選択する



② 決定ボタンを押す




③ 下ボタンを押し「カメラ手順編集」を選択




④ 決定ボタンを押す




自動的にカメラが起動するので決定ボタンで写真を撮る

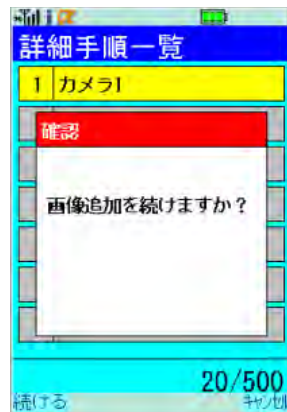


新しい詳細手順を続けて追加する場合は、左上ボタンを押す

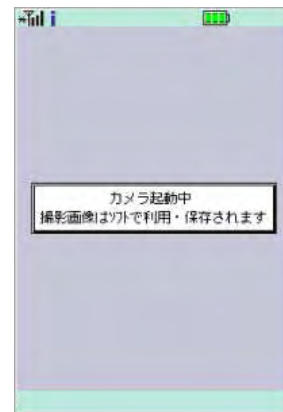


再び自動的にカメラが起動するので決定ボタンで写真を撮る

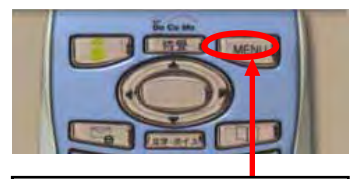


手順の追加を終了する場合は、右上ボタンを押す

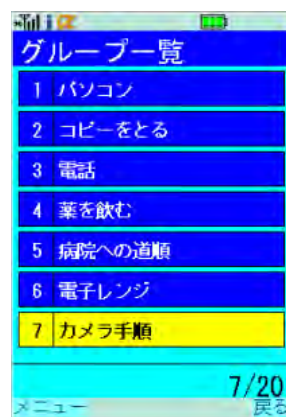

詳細手順一覧に戻るの
で**右上ボタン**を押す

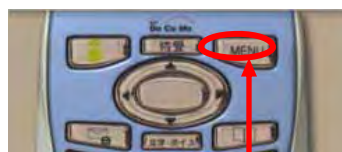

右上ボタンを押す

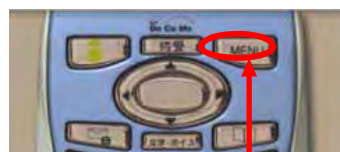

右上ボタンを押す

自動的に初めの画面
に戻る

(2) 「スケジュール」編集のしかた





a. 追加（新規登録）

ここでは「**2009年 11月 15日の 12時半に Aさんに電話**」というスケジュールを設定する。

1. スケジュール編集の起動



2. スケジュールを入れる日付の設定

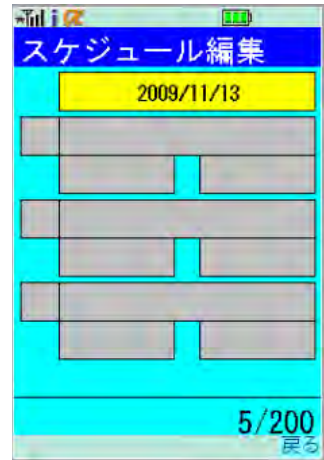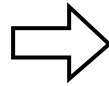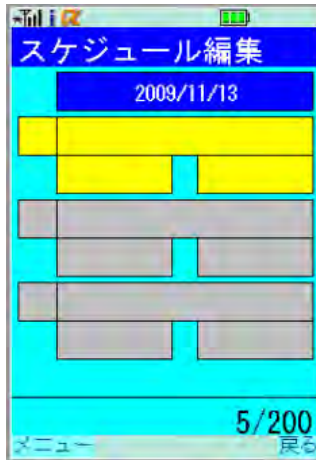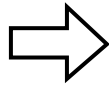




本日のスケジュール追加画面が自動で表示されているので、**右上ボタン**を押す



上ボタンを押し、日付の欄に合わせる




決定ボタンを押す

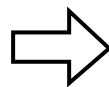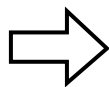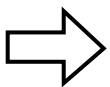

カレンダーが表示されるので、**十字キー**でスケジュールを設定したい日付を選択する







決定ボタンを押す

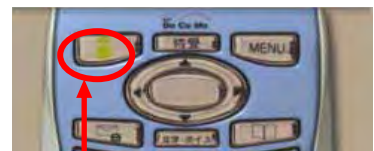

左上ボタンを押して、注意書きを閉じる

3. スケジュール内容の設定

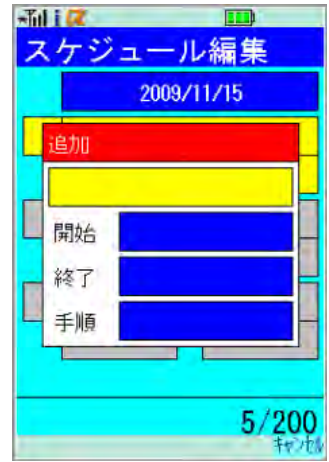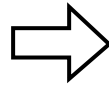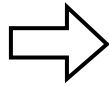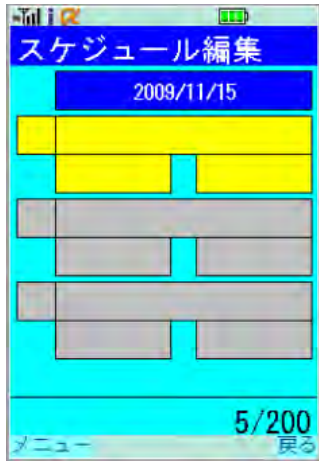




左上ボタンを押す



「追加」を選択し、決定ボタンを押す




決定ボタンを押す

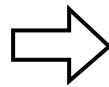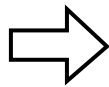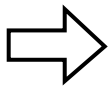

文字キーで予定を入力する




入力が終わったら決定ボタンを押す

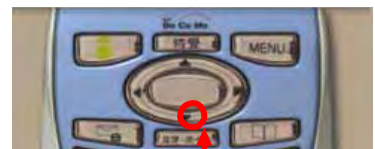

入力内容が反映されるので、下ボタンを押して次の操作へ

4. スケジュール時刻の設定

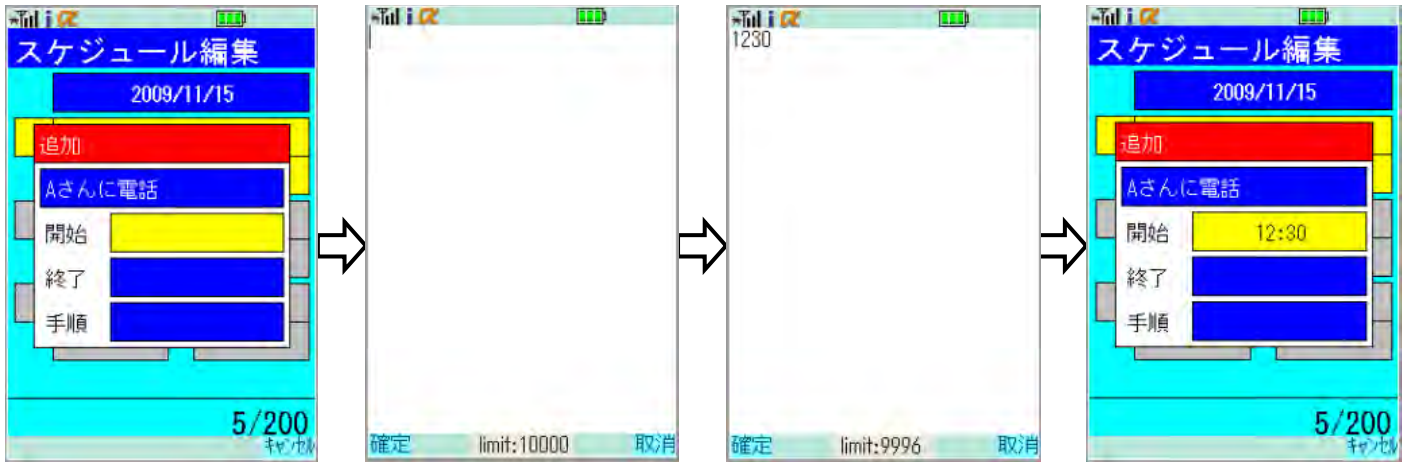

決定ボタンを押す



文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する



入力が終わったら
決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、
下ボタンを押して次の操作へ



決定ボタンを押す



文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する





入力が終わったら
決定ボタンを押す




入力内容が反映されるので、
下ボタンを押して次の操作へ

5. スケジュール内容の手順の設定

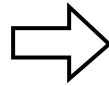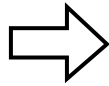





決定ボタンを押す

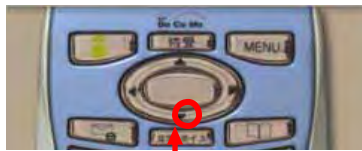

登録してある手順の中から、使用するものを**下ボタン**で選択



選択したら**決定ボタン**を押す

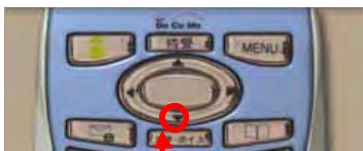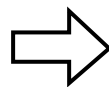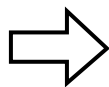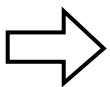

登録してある詳細手順の中から、使用したいものを**下ボタン**で選択





選択したら**決定ボタン**を押す



入力内容が反映されるので、**左上ボタン**を押して登録画面に進む

6. 設定したスケジュール内容の保存

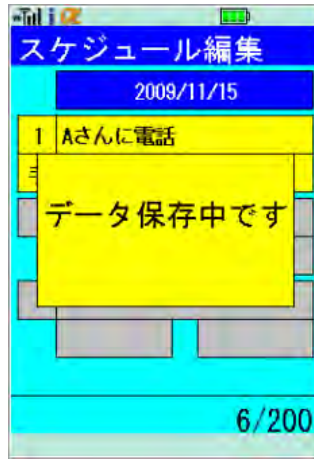
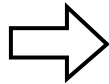


右上ボタンを押す

数秒「データ保存中です」の画面が表示された後、データが保存（登録）される

b. スケジュール内容の編集（変更）

ここでは、「14:00～15:30 言語訓練」というアラーム内容を「14:00～15:00 言語訓練」という内容に変更する。

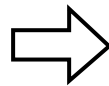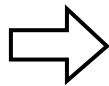




変更したいスケジュールを選択し、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので、**下ボタン**を押す




「編集」を選択し、**決定ボタン**を押す

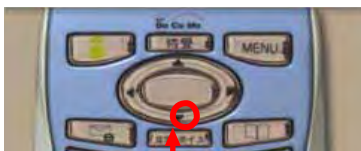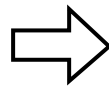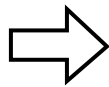




アラーム内容が表示されるので、**下ボタン**を押す




「時刻」を選択し、**決定ボタン**を押す

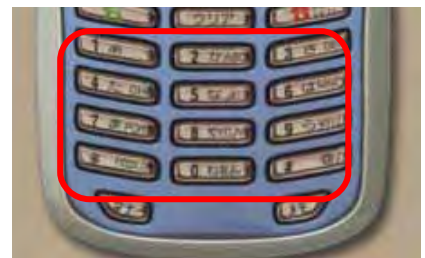

文字キーで時間を入力する

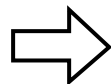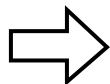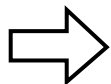




変更内容を入力し、
決定ボタンを押す

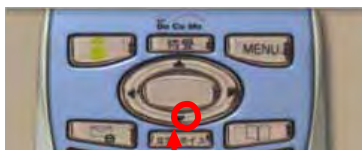

変更内容を確認し、左上
ボタンで登録する





右上ボタンを押す

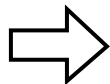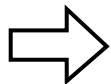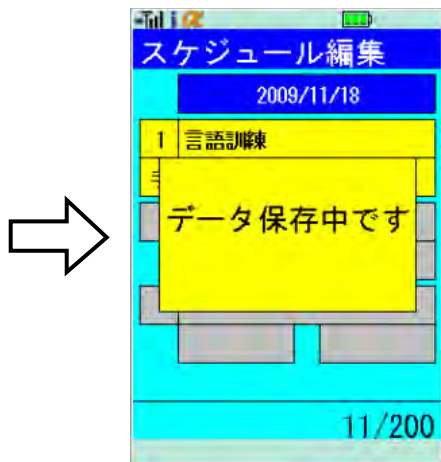

数秒「データ保存中です」
の画面が表示された後、デ
ータが保存（登録）される

自動的に初めの画面に戻
る

c. スケジュール内容の削除

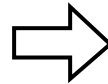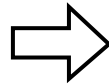






削除したいスケジュールを選択し、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**下ボタン**を押す



「削除」を選択し、**決定ボタン**を押す

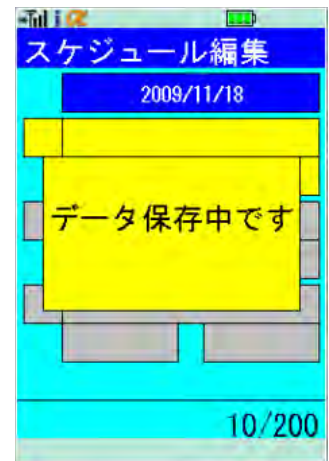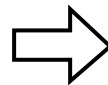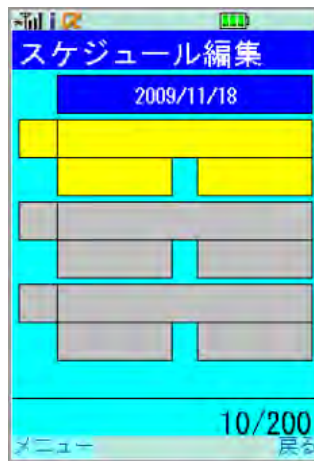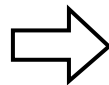
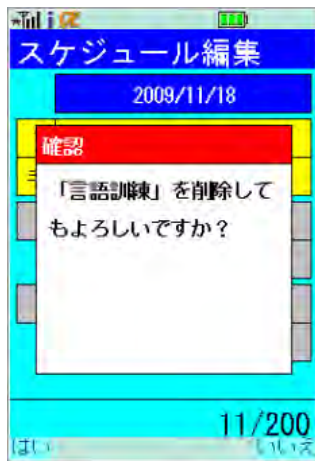


確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す




スケジュールが削除されているのを確認し、**右上ボタン**を押し、更新内容を保存する

d. スケジュールの全削除 ※表示している日のスケジュールが全て削除される

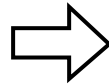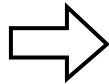







スケジュールを削除したい日を選択し、左上ボタンを押す

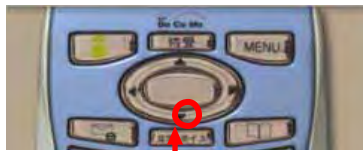

メニューが開くので下ボタンを押す



「全削除」を選択し、決定ボタンを押す

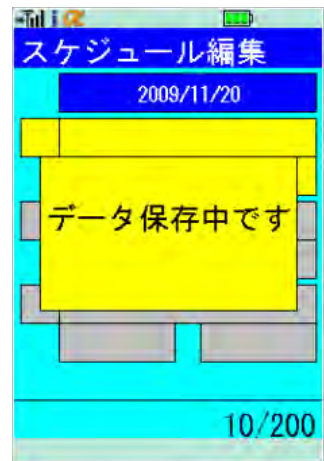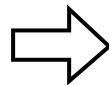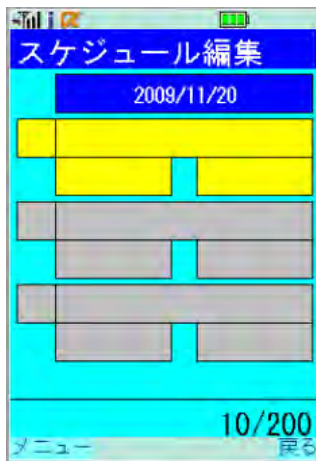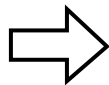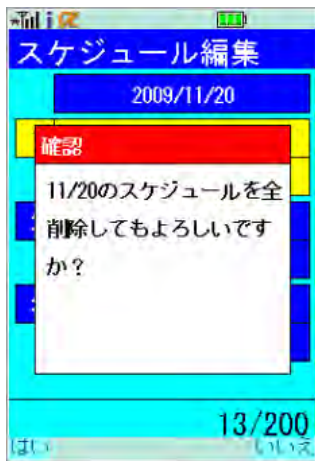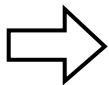


確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す




スケジュールが削除されているのを確認し、右上ボタンを押し、更新内容を保存する

e. スケジュールの複写 ※指定したスケジュールが複写される

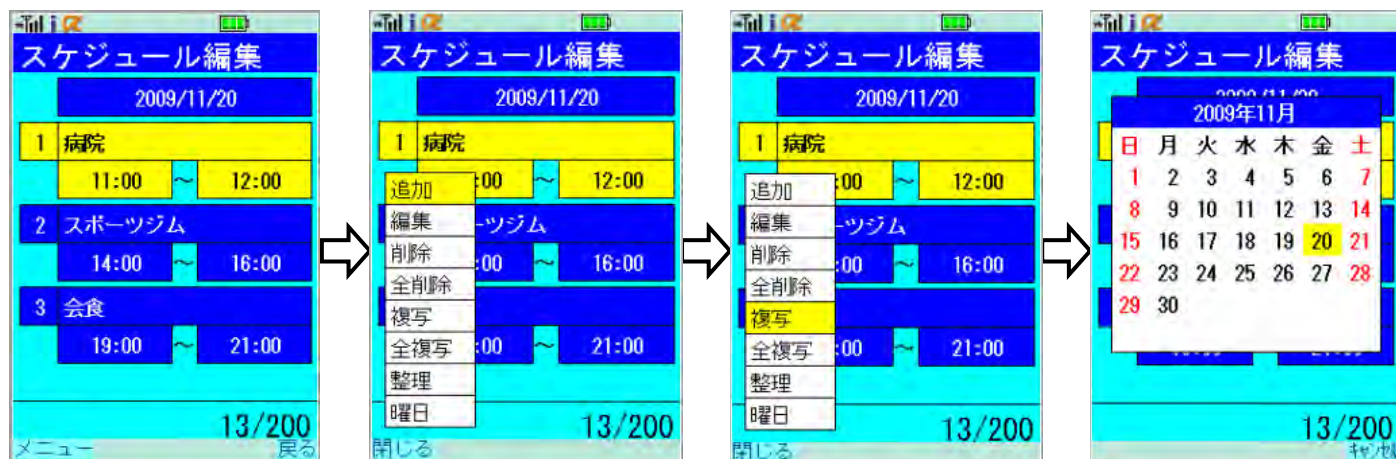


複写元となるスケジュールを選び、
左上ボタンを押す

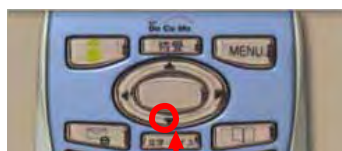


メニューが開くので下ボタンを押す



「複写」を選び
決定ボタンを押す

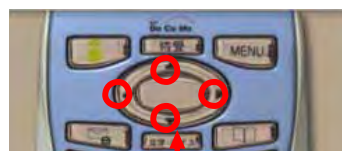


カレンダーが表示されるので、
十字ボタンで複写先の日付を選ぶ

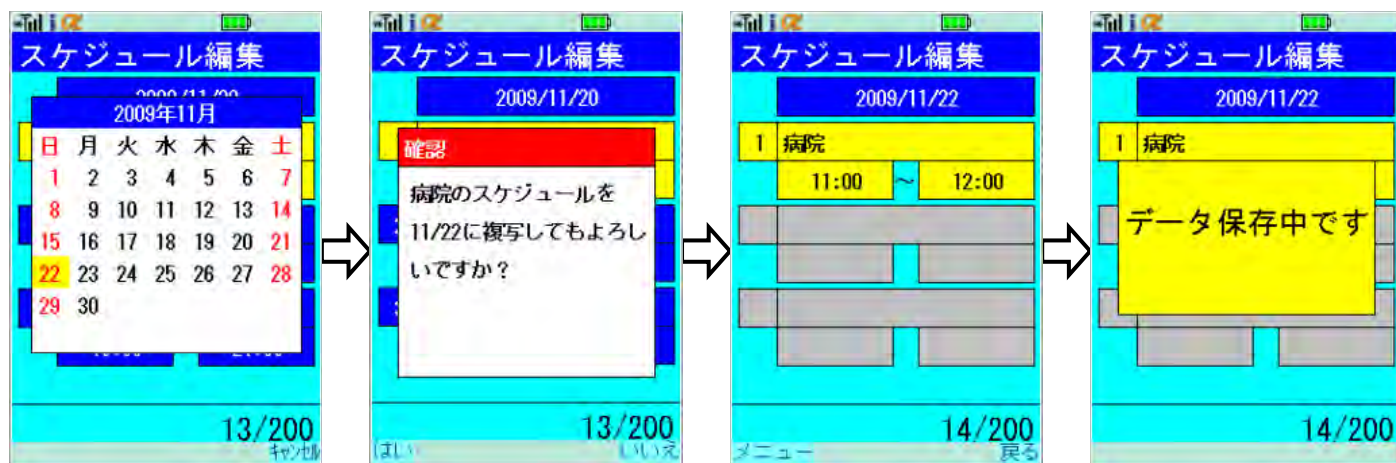

決定ボタンを押す




確認画面が表示されるので、
左上ボタンを押す

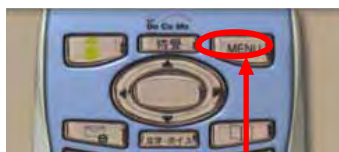

複写されているのを確認し、
右上ボタンを押し、更新内容を保存する

f. スケジュールの全複写 ※表示している日のスケジュールが全て複写される

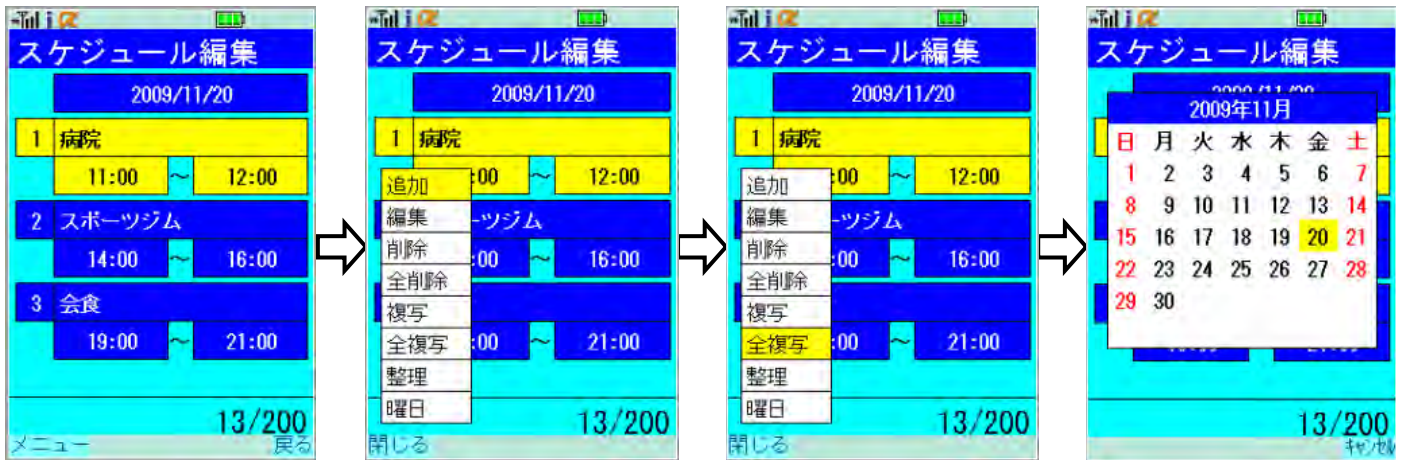

スケジュールの複写元となる日を選び、
左上ボタンを押す




メニューが開くので下ボタンを押す



「全複写」を選び
決定ボタンを押す



カレンダーが表示されるので、
十字ボタンで複写先の日付を選ぶ

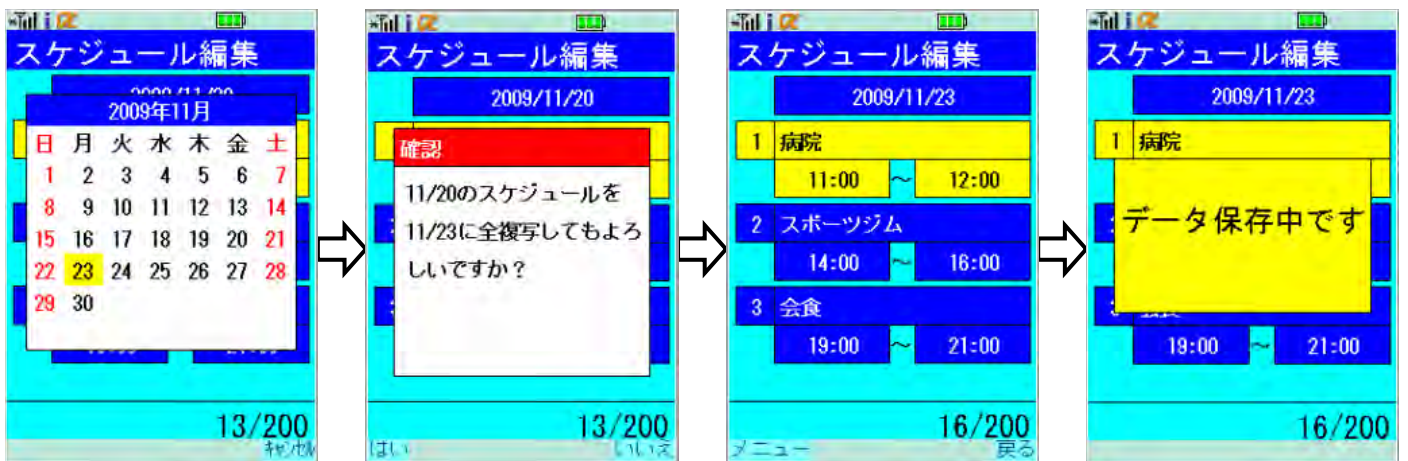

決定ボタンを押す





確認画面が表示されるので、
左上ボタンを押す



複写されているのを確認し、
右上ボタンを押し、更新内容を保存する

g. 過去のスケジュール整理（消去）

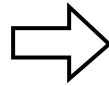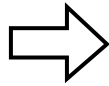







スケジュール編集画面を開き、左上ボタンを押す



メニューが開くので下ボタンを押す



「整理」を選択し、決定ボタンを押す

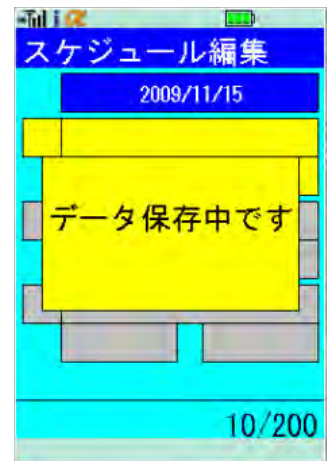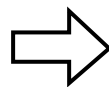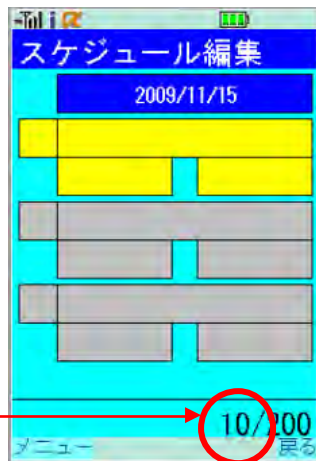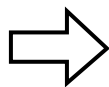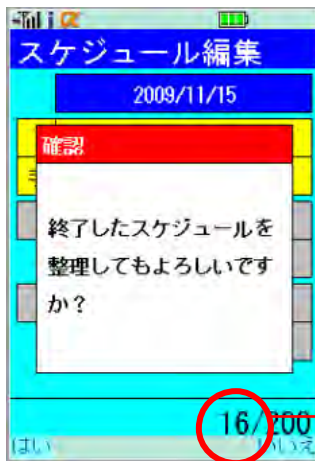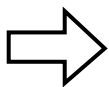

確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す



スケジュールが削除されているのを確認し、右上ボタンを押し、更新内容を保存する

h. 週間スケジュール

ここでは「11/19～12/17の毎週木曜日、15時半～17時に〇〇病院で訓練」というスケジュールを設定する。

1. スケジュール編集の起動



①下ボタンを押し「データ編集」を選択する

②決定ボタンを押す


③下ボタンを押し「スケジュール編集」を選択

④決定ボタンを押す

2. 週間スケジュールを適用する曜日を設定

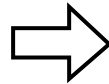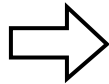






「本日のスケジュールはありません」と表示されるが、数秒待つと消えるので、**左上ボタン**を押す

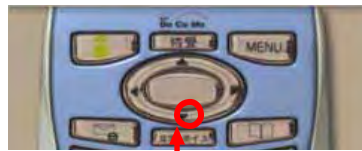

下ボタンを押し「曜日」を選択する




決定ボタンを押す

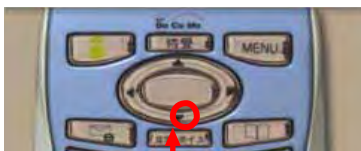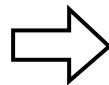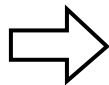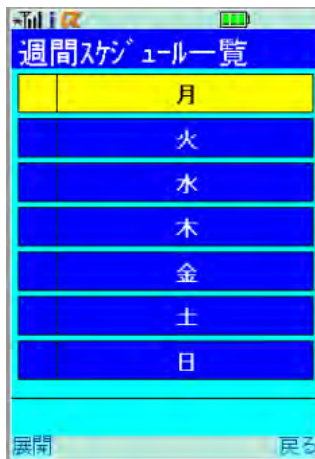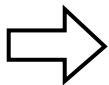

曜日一覧が表示されるので、**下ボタン**で登録したい曜日を選択する







決定ボタンを押す

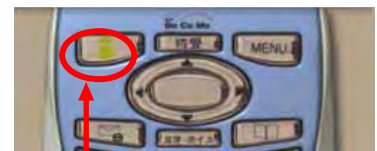

左上ボタンを押して、注意書きを閉じる

3. スケジュール内容の設定

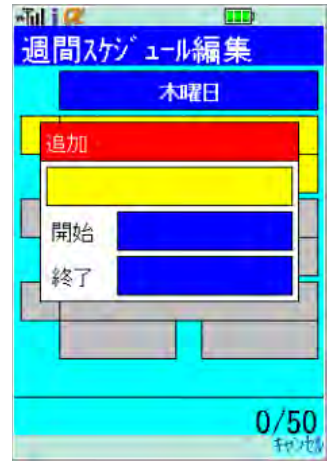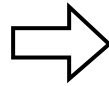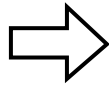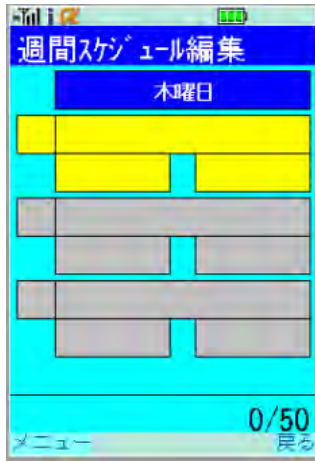






左上ボタンを押す



「追加」を選択し、決定ボタンを押す




決定ボタンを押す

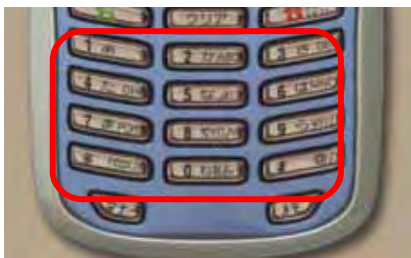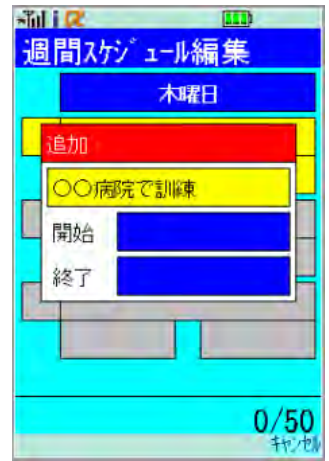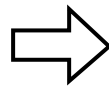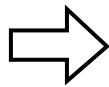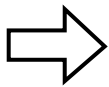

文字キーで予定を入力する



入力が終わったら決定ボタンを押す

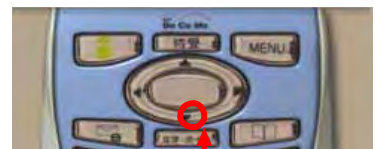

入力内容が反映されるので、下ボタンを押して次の操作へ

4. スケジュール時刻の設定



決定ボタンを押す




文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する




入力が終わったら
決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、
下ボタンを押して次の操作へ

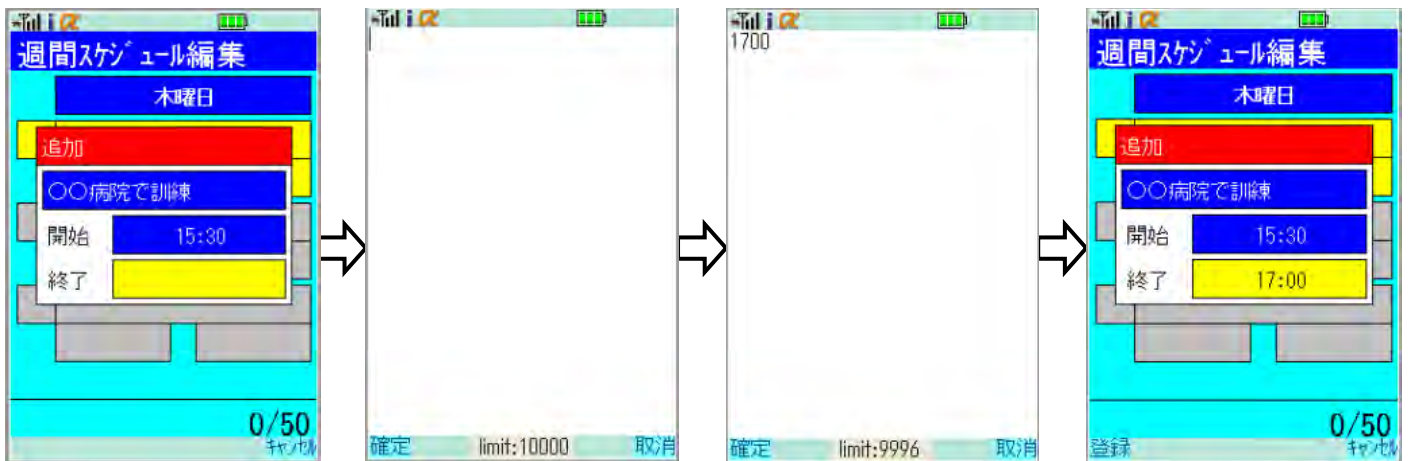

決定ボタンを押す

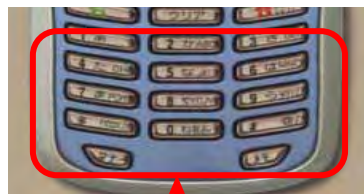

文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する





入力が終わったら
決定ボタンを押す



入力内容を確認し、
左上ボタンを押して登録する

5. 週間スケジュールの削除

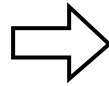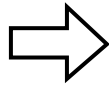




削除したい週間スケジュールを選び、左上ボタンを押す



メニューが開くので上下ボタンを押す





「削除」を選択し、決定ボタンを押す

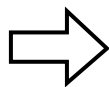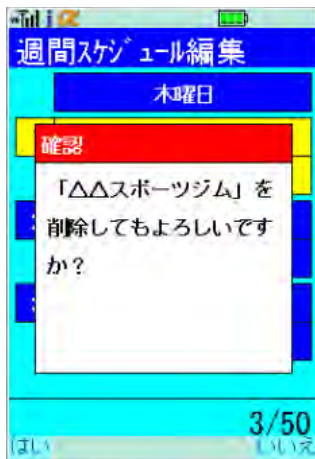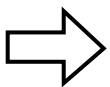

確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す

週間スケジュールが削除されているのを確認する

6. 週間スケジュールの全削除

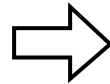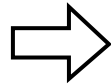






週間スケジュールを削除したい曜日を選び、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**上下ボタン**を押す



「全削除」を選択し、**決定ボタン**を押す

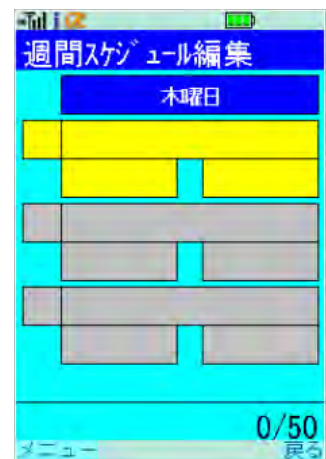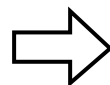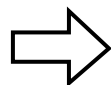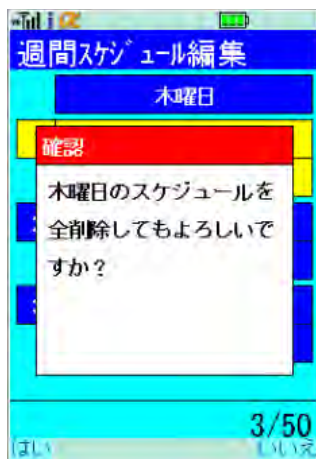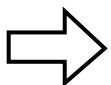


確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す



左上ボタンを押す

週間スケジュールが全て削除されているのを確認する

7. 週間スケジュールの複写

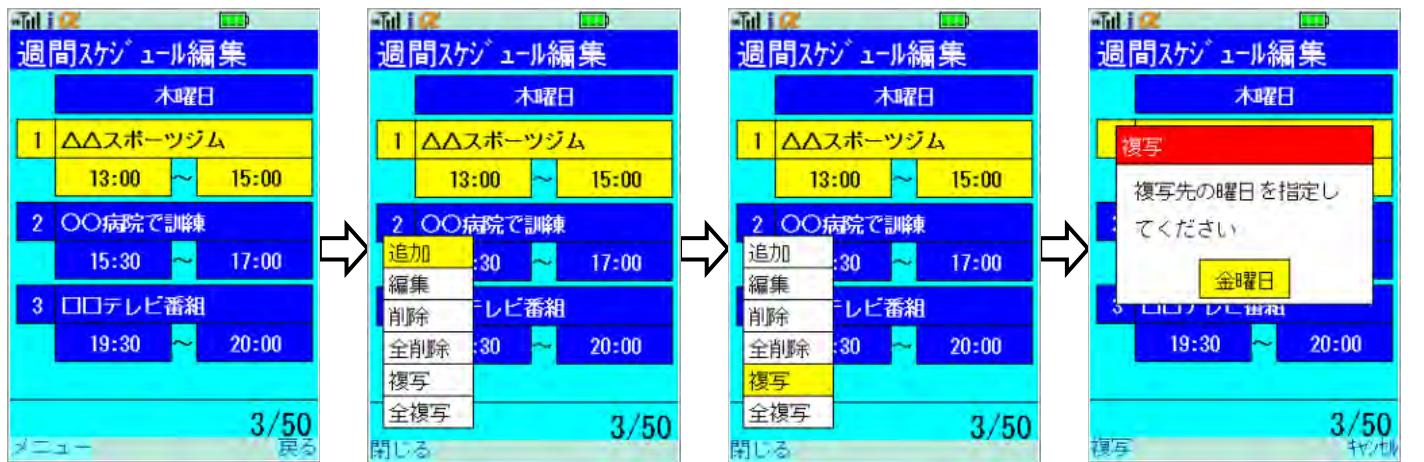

複写元となる週間スケジュールを選び、**左上ボタン**を押す





メニューが開くので**上下ボタン**を押す



「複製」を選び**決定ボタン**を押す



決定ボタンを押して曜日一覧を表示する

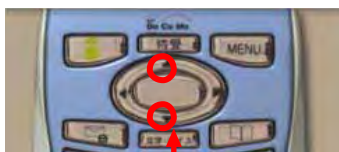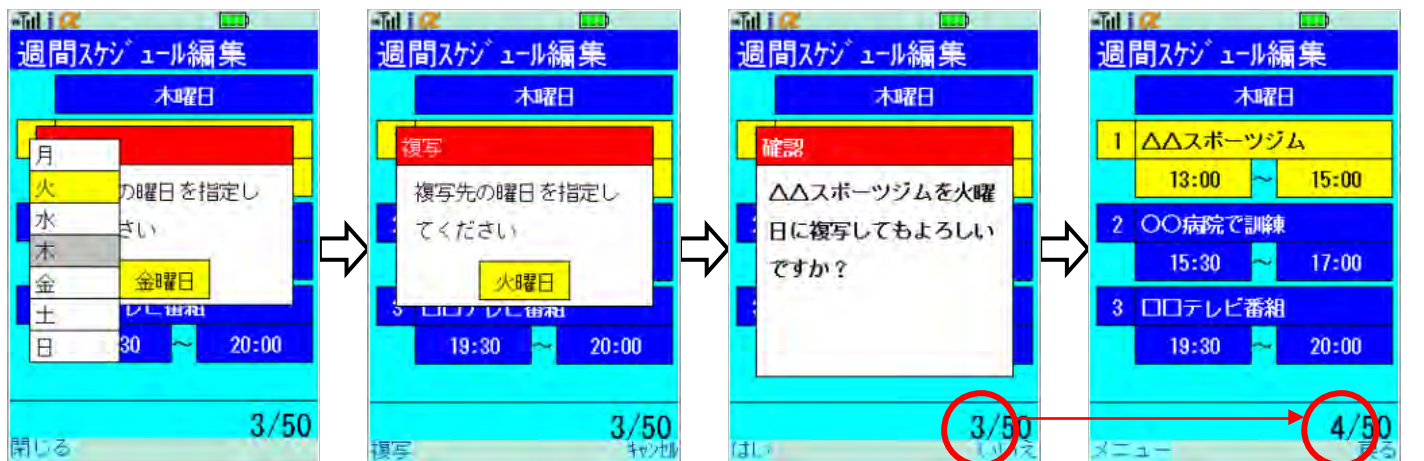


曜日一覧が表示されるので、**上下ボタン**で複写先を選び**決定ボタン**を押す



決定ボタンを押す




確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す

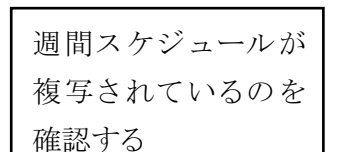

週間スケジュールが複写されているのを確認する

8. 週間スケジュールの全複写

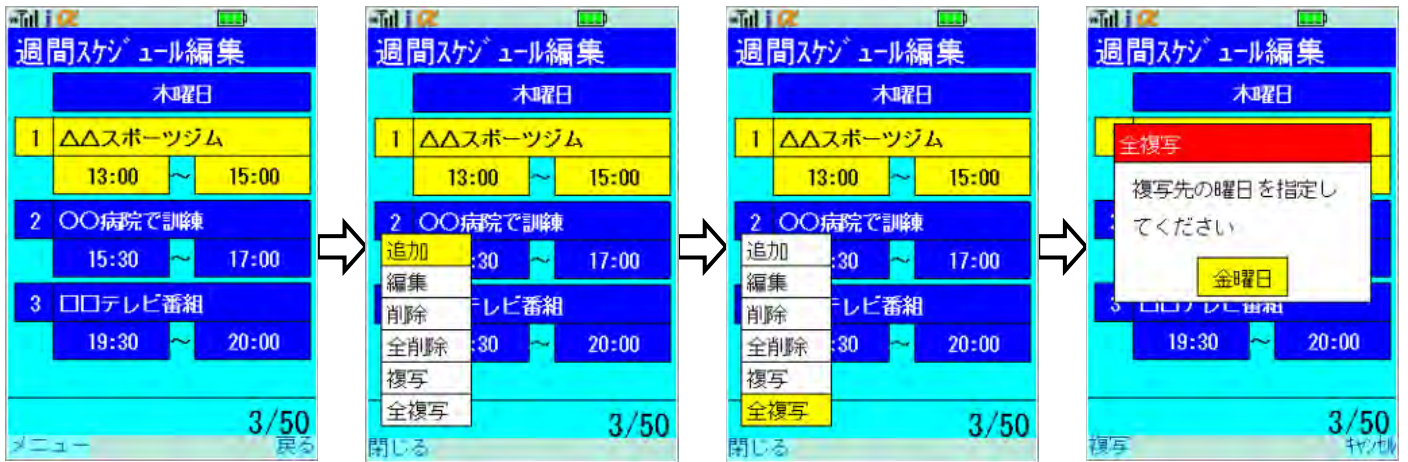

週間スケジュールを複写したい曜日を選び、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**上下ボタン**を押す




「全複写」を選び**決定ボタン**を押す




決定ボタンを押して曜日一覧を表示する




曜日一覧が表示されるので、**上下ボタン**で複写先を選び**決定ボタン**を押す

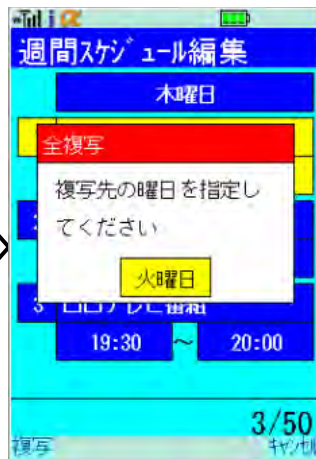

決定ボタンを押す



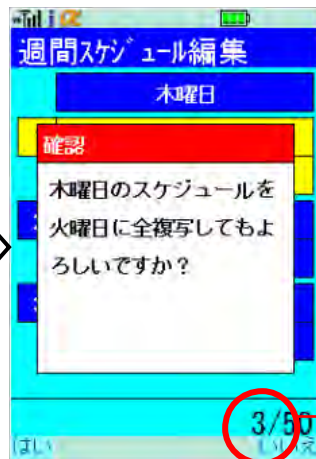


確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す

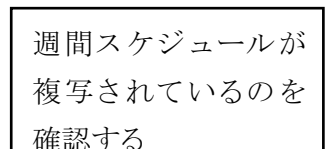

週間スケジュールが複写されているのを確認する

9. 週間スケジュールを適用する期間を設定

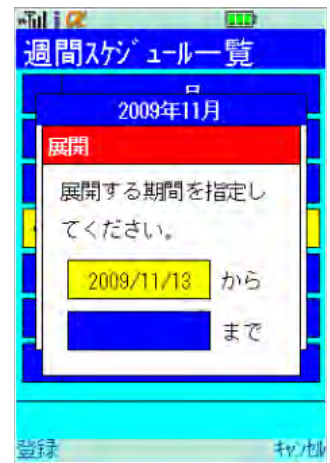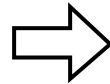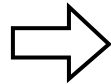





入力内容を確認し、
右上ボタンを押す



左上ボタンを押す




決定ボタンを押す

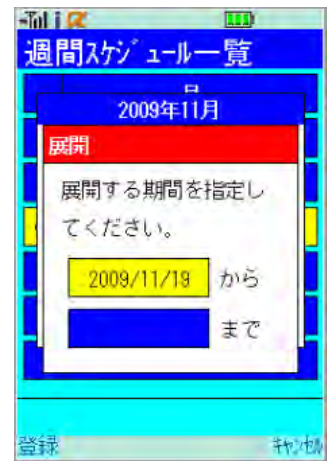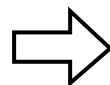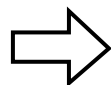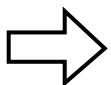




カレンダーが表示されるので、
十字ボタンでスケジュールを開始する日を選択する



決定ボタンを押す

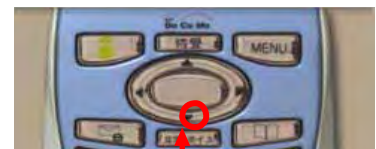

内容を確認し、下ボタン
で次の操作へ進む

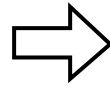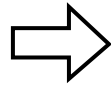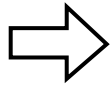





決定ボタンを押す




カレンダーが表示されるので、十字ボタンでアラームを終了する日を選択する



決定ボタンを押す

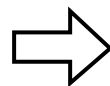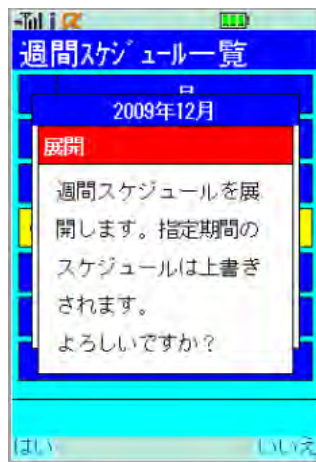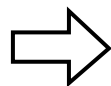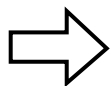

左上ボタンを押す

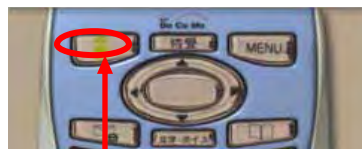


確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す



曜日選択画面に戻るので、右上ボタンを押す

10. 設定した週間スケジュール内容の保存

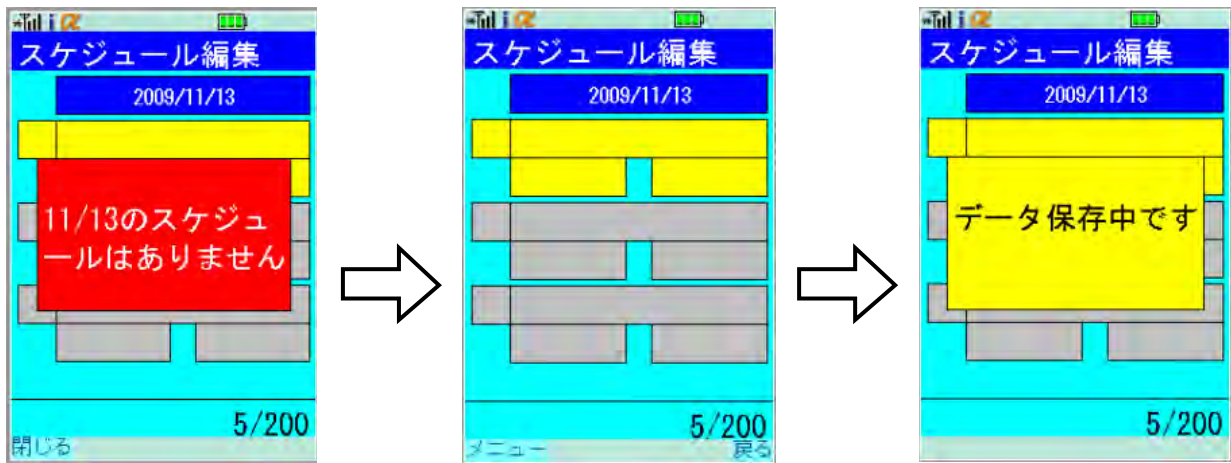

初めの画面にもどるので、**左上ボタン**を押す



右上ボタンを押して登録する

(3) 「アラーム」編集のしかた

a. 追加（新規登録）

ここでは「2009年 11月 16日の 14時に〇〇病院に行く」というアラームを設定する。

1. アラーム編集の起動





① 下ボタンを押し「データ編集」を選択する

② 決定ボタンを押す

③ 下ボタンを押し「アラーム編集」を選択する

④ 決定ボタンを押す

2. アラームを使用する日付の設定

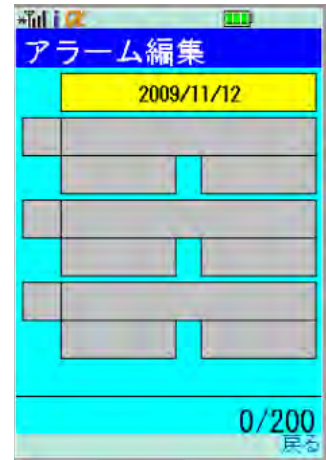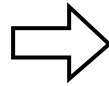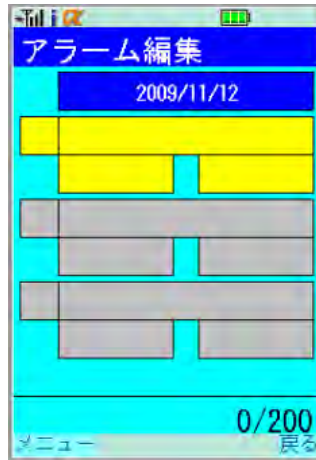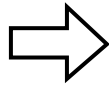





本日のアラーム追加画面が自動で表示されているので、**右上ボタン**を押す



上ボタンを押し、日付の欄に合わせる




決定ボタンを押す

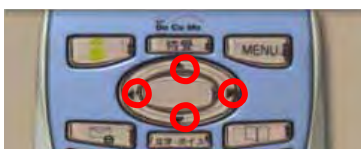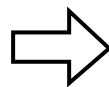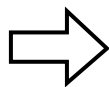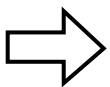

カレンダーが表示されるので、**十字キー**でアラームを設定したい日付を選択する






決定ボタンを押す

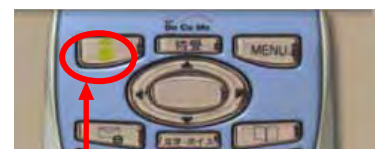

左上ボタンを押して、注意書きを閉じる

3. アラームで知らせる内容の設定

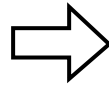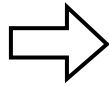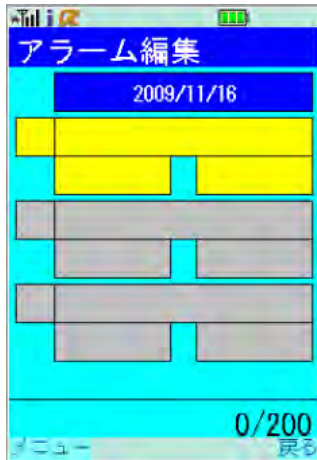




左上ボタンを押す



「追加」を選択し、決定ボタンを押す




決定ボタンを押す

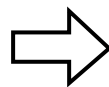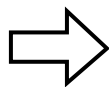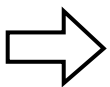

文字キーで予定を入力する




入力が終わったら決定ボタンを押す

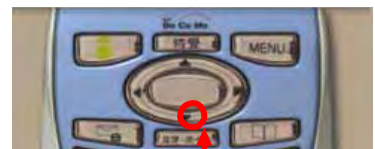


入力内容が反映されるので、下ボタンを押して次の操作へ

4. アラームの時刻の設定

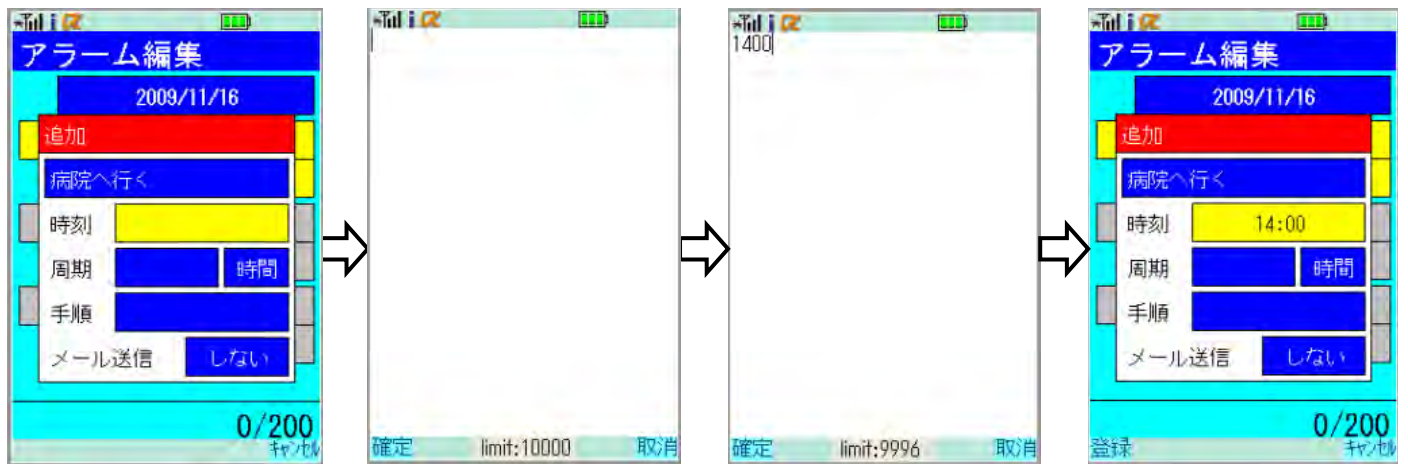

決定ボタンを押す

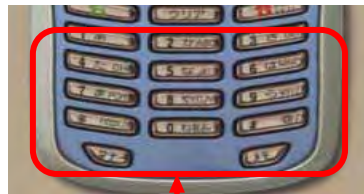

文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する




入力が終わったら
決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、
下ボタンを押して次の操作へ

5. アラームの周期の設定

ここでは、アラームを終了させるまで「5分周期」で繰り返すよう設定する。

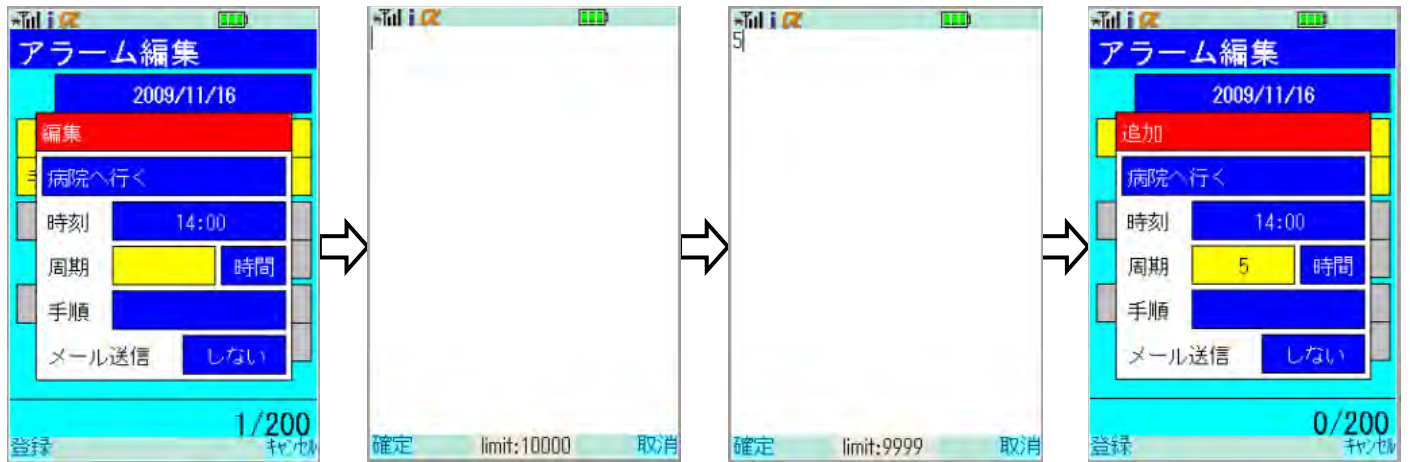

決定ボタンを押す




文字キーで繰り返したい
時間または数字を入力



決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、**下ボタン**を押して次の操作へ

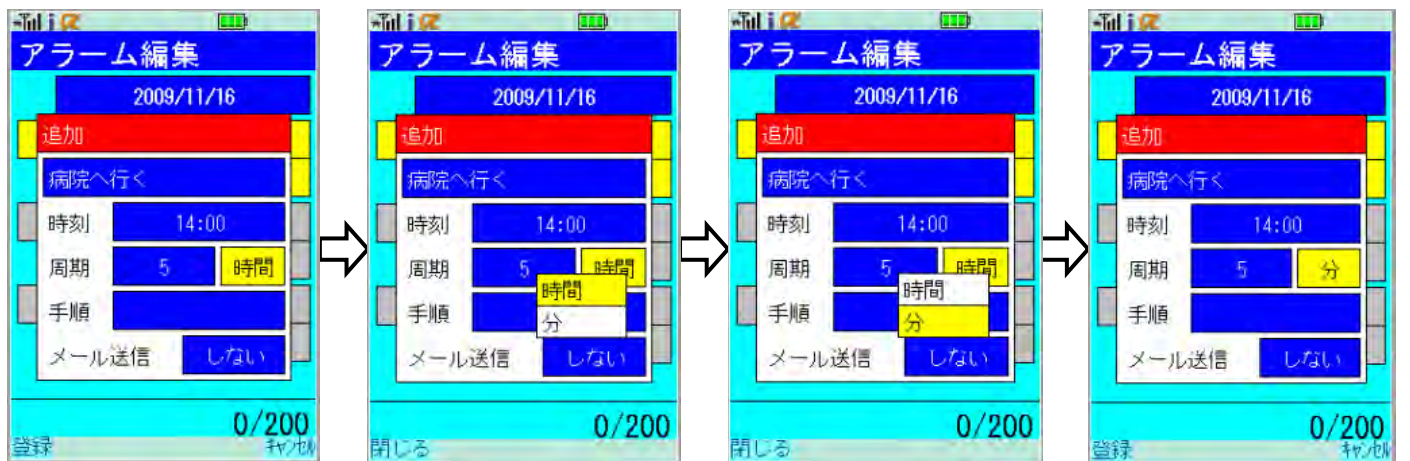

決定ボタンを押す



下ボタンを押し「分」を
選択する





決定ボタンを押す




入力内容が反映されるので、**下ボタン**を押して次の操作へ

6. アラームで知らせる手順の設定

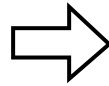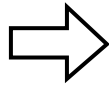





左上ボタンを押す

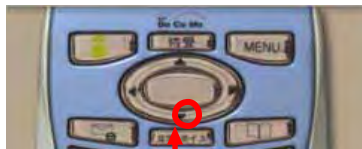

登録してある手順の中から、アラームで知らせたいものを下ボタンで選択



選択したら決定ボタンを押す

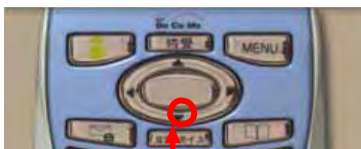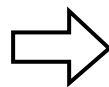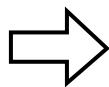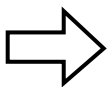

登録してある詳細手順の中から、アラームで知らせたいものを下ボタンで選択



選択したら決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、下ボタンを押して次の操作へ

7. メール送信の設定

1/200

決定ボタンを押す

下ボタンを押し「する」を選択する

決定ボタンを押す

入力内容が反映されるので、左上ボタンを押して登録画面に進む

8. 設定したアラーム内容の保存

1/200

1 病院へ行く
手 14:00 5分

データ保存中です



1/200

右上ボタンを押す


数秒「データ保存中です」の画面が表示された後、データが保存（登録）される

b. アラーム内容の編集 (変更) ※過去のアラーム内容は変更することができない。

ここでは、「15時に歯医者へ行く」というアラーム内容を「16時に歯医者へ行く」という内容に変更する。

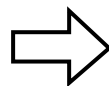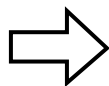




変更したいアラームを選択し、**左上ボタン**を押す

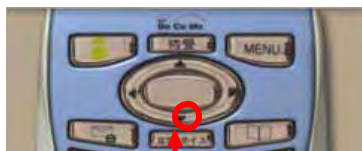

メニューがひらくので、**下ボタン**を押す



「編集」を選択し、**決定ボタン**を押す

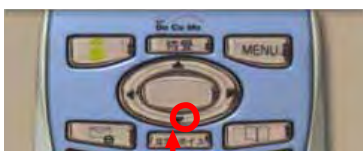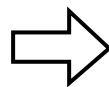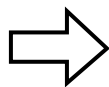





アラーム内容が表示されるので、**下ボタン**を押す。




「時刻」を選択し、**決定ボタン**を押す



文字キーで時間を入力する

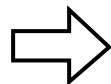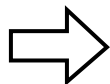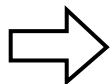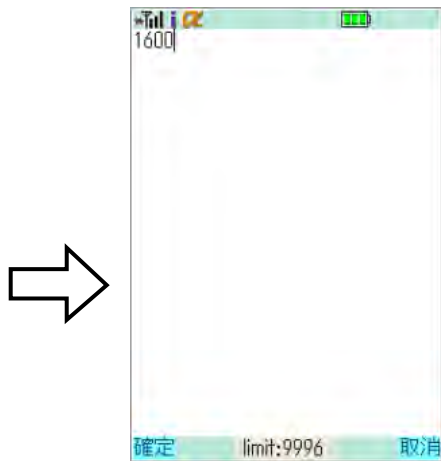




変更内容を入力し、
決定ボタンを押す

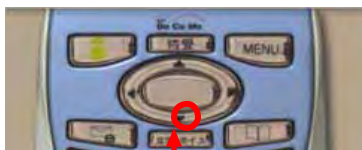

変更内容を確認し、左上
ボタンで登録する





右上ボタンを押す

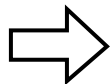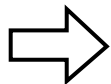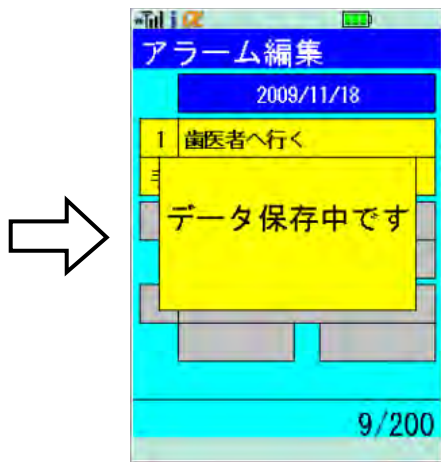


数秒「データ保存中です」
の画面が表示された後、デ
ータが保存（登録）される

自動的に初めの画面に戻
る

c. アラーム内容の削除

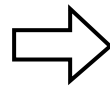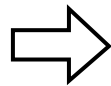







削除したいアラームを選択し、**左上ボタン**を押す

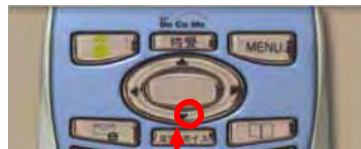


メニューが開くので**下ボタン**を押す



「削除」を選択し、**決定ボタン**を押す

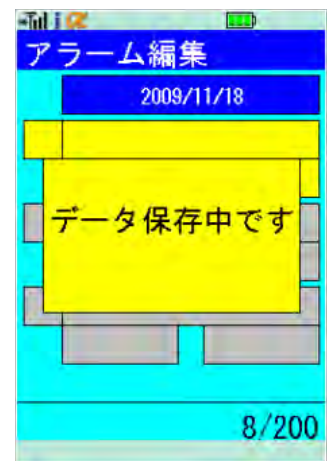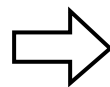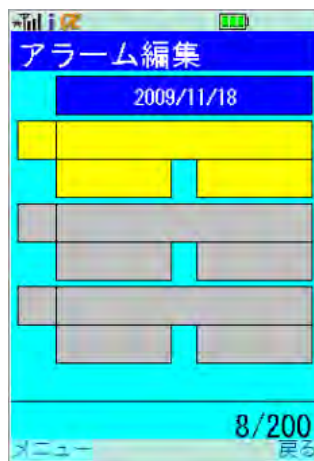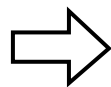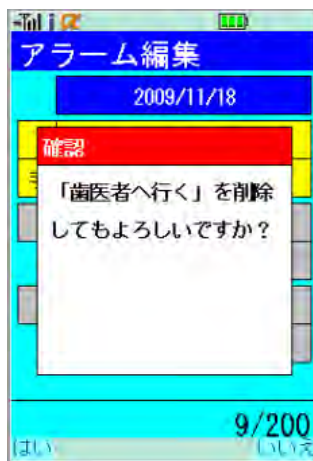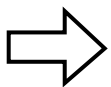


確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す

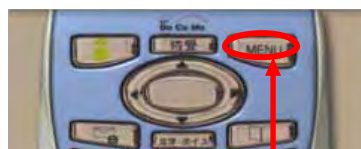


アラームが削除されているのを確認し、**右上ボタン**を押し、更新内容を保存する

d. アラームの複写 ※指定したアラームが複写される

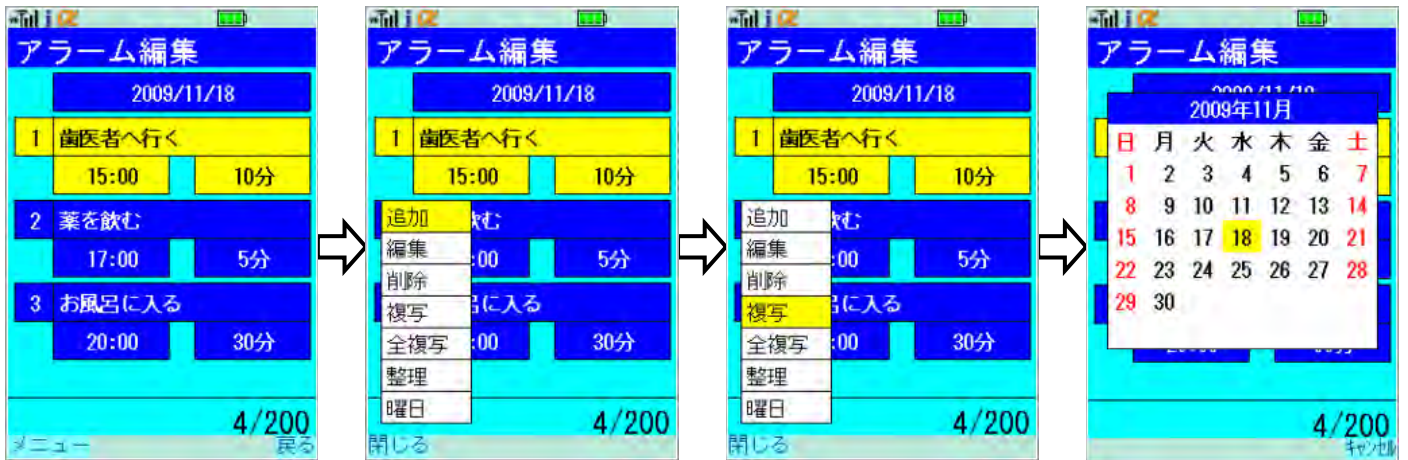

複写元となるアラームを選び、左上ボタンを押す

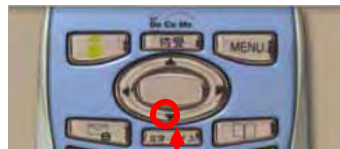


メニューが開くので下ボタンを押す



「複写」を選び決定ボタンを押す




カレンダーが表示されるので、十字ボタンで複写先の日付を選ぶ

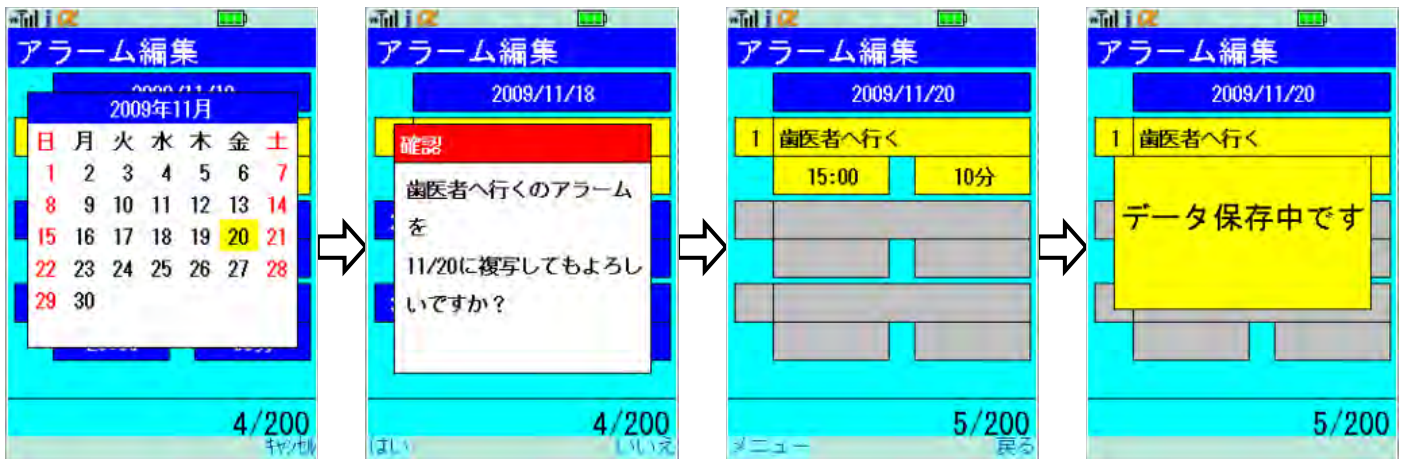

決定ボタンを押す




確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す

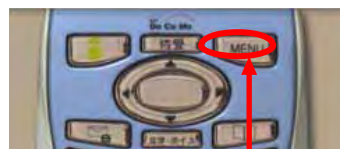

複写されているのを確認し、右上ボタンを押す、更新内容を保存する

e. アラームの全複写 ※表示している日のアラームが全て複写される

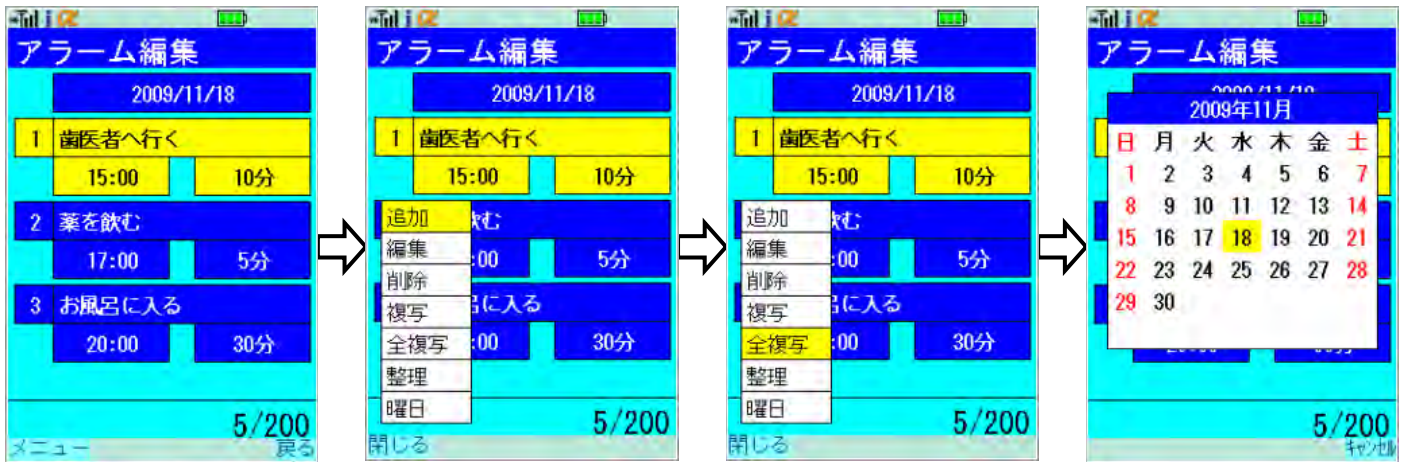

アラームの複写元となる日を選び、
左上ボタンを押す





メニューが開くので下ボタンを押す



「全複写」を選び決定ボタンを押す




カレンダーが表示されるので、
十字ボタンで複写先の日付を選ぶ

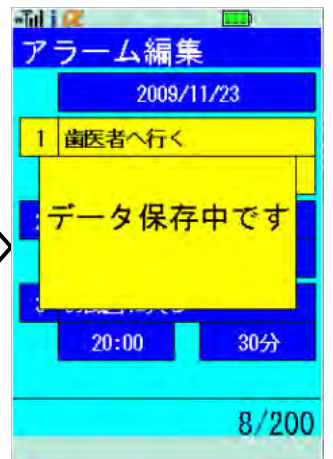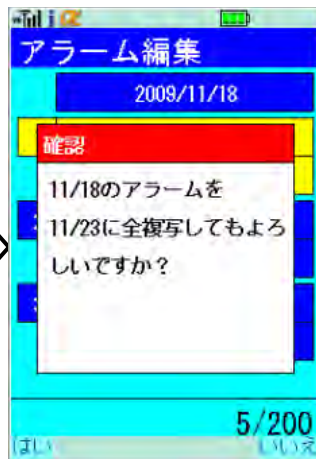

決定ボタンを押す





確認画面が表示されるので、
左上ボタンを押す

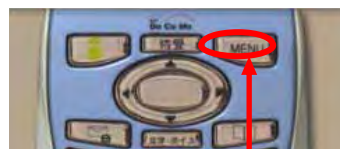

複写されているのを確認し、
右上ボタンを押し、更新内容を保存する

f. 過去のアラーム整理 (消去)

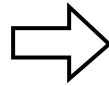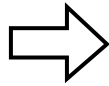






アラーム編集画面を開き、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**下ボタン**を押す



「整理」を選択し、**決定ボタン**を押す

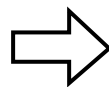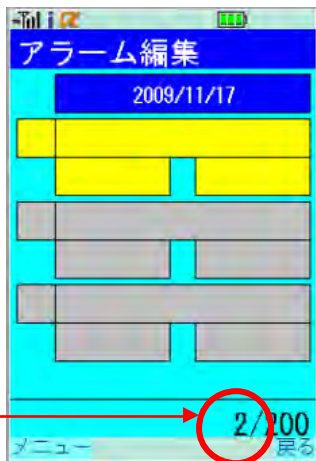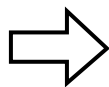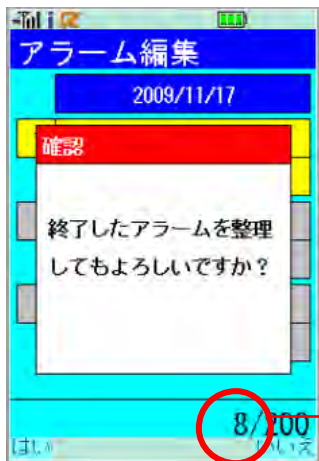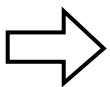

確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す




アラームが削除されているのを確認し、**右上ボタン**を押し、更新内容を保存する

g. 週間アラーム

ここでは「11/17～12/8の毎週火曜日 15時に△△歯科へ出発」というアラームを設定する。

1. アラーム編集の起動

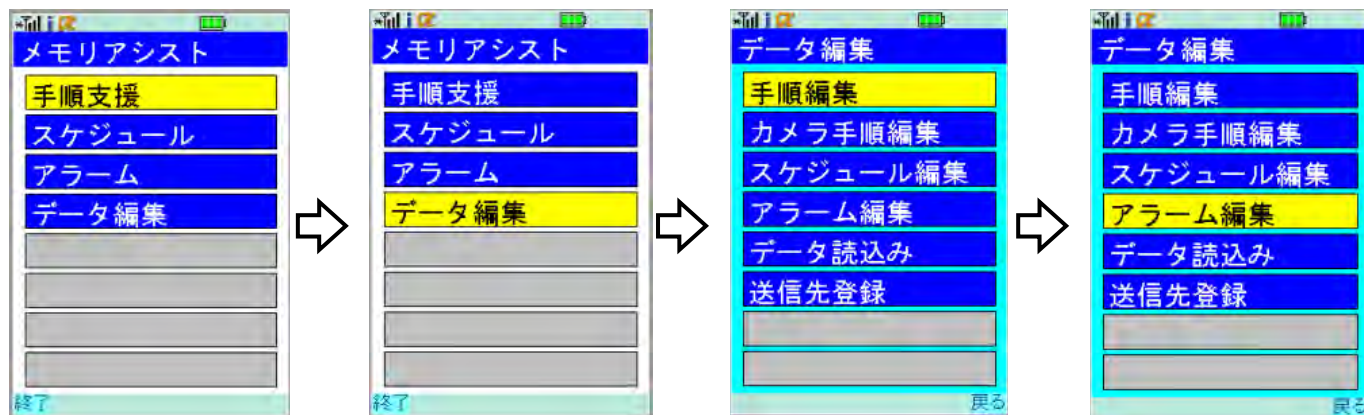

① 下ボタンを押し「データ編集」を選択する



② 決定ボタンを押す





③ 下ボタンを押し「アラーム編集」を選択する



④ 決定ボタンを押す

2. 週間アラームを適用する曜日を設定

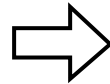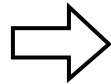






「本日のアラームはありません」と表示されるが、数秒待つと消えるので、**左上ボタン**を押す



下ボタンを押し「曜日」を選択する



決定ボタンを押す

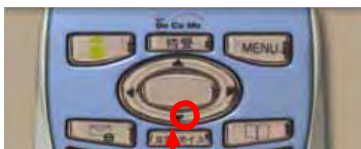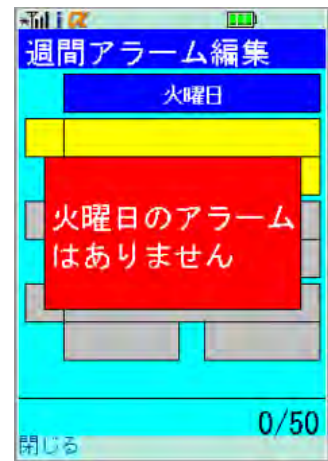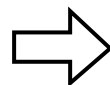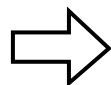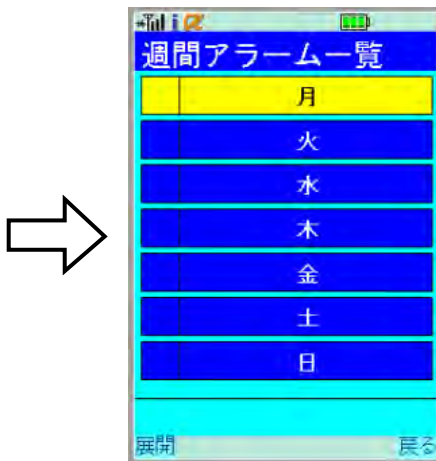

曜日一覧が表示されるので、**下ボタン**で登録したい曜日を選択する







決定ボタンを押す



左上ボタンを押して、**注意書き**を閉じる

3. アラームで知らせる内容の設定

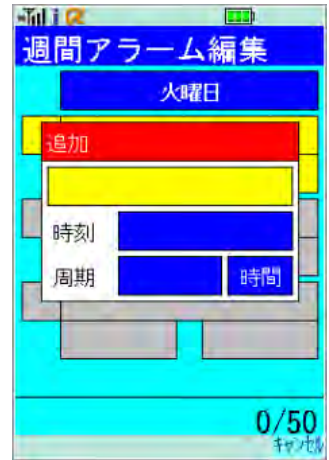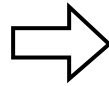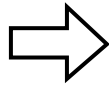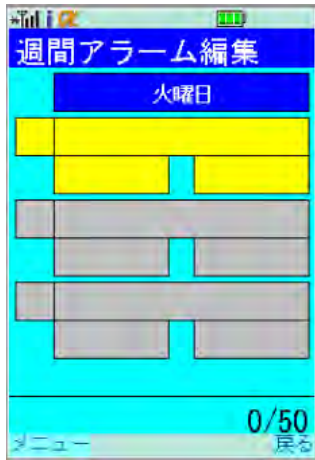





左上ボタンを押す



「追加」を選択し、決定ボタンを押す




決定ボタンを押す

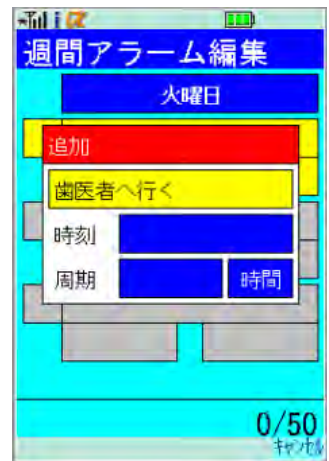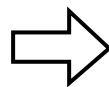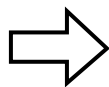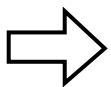

文字キーで予定を入力する



入力が終わったら決定ボタンを押す

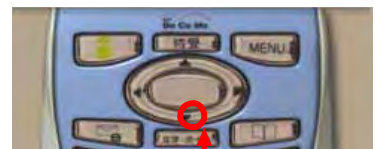


入力内容が反映されるので、下ボタンを押して次の操作へ

4. アラームの時刻の設定



決定ボタンを押す

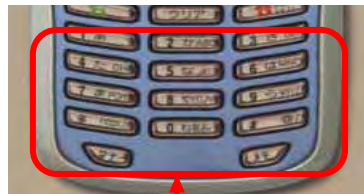

文字キーで時間・分を
4ケタの数字で入力する




入力が終わったら
決定ボタンを押す




入力内容が反映されるので、
下ボタンを押して次の操作へ

5. アラームの周期の設定

ここでは、アラームを終了させるまで **10分周期**で繰り返すよう設定する。

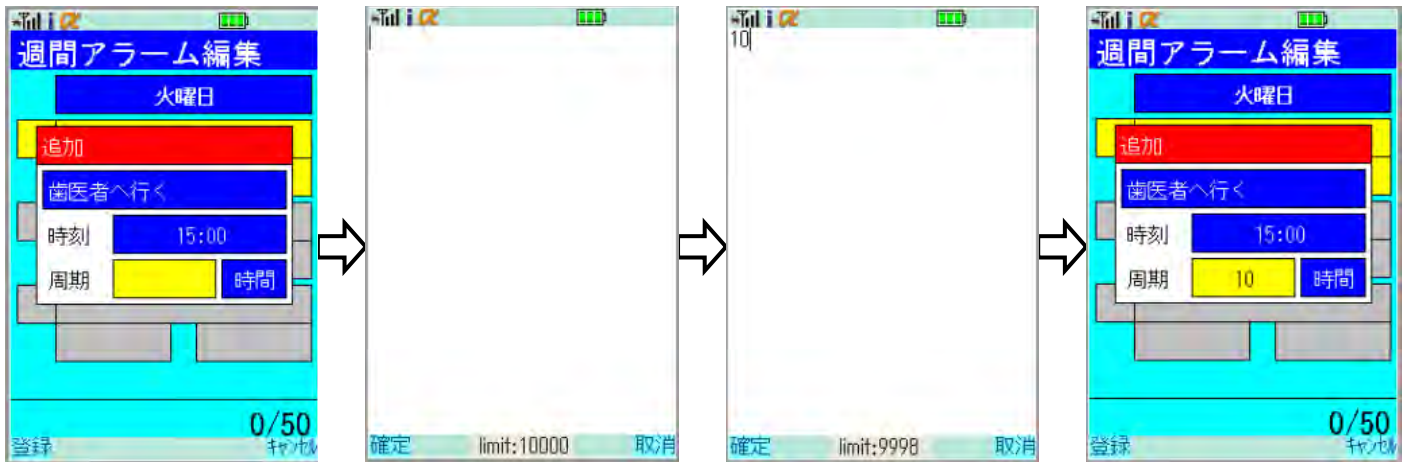

決定ボタンを押す

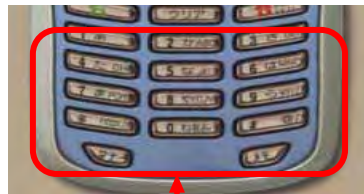



文字キーで繰り返したい
時間または数字を入力



決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、**下ボタン**を押して次の操作へ

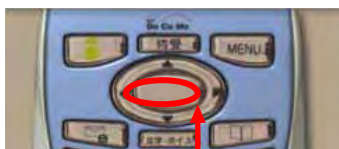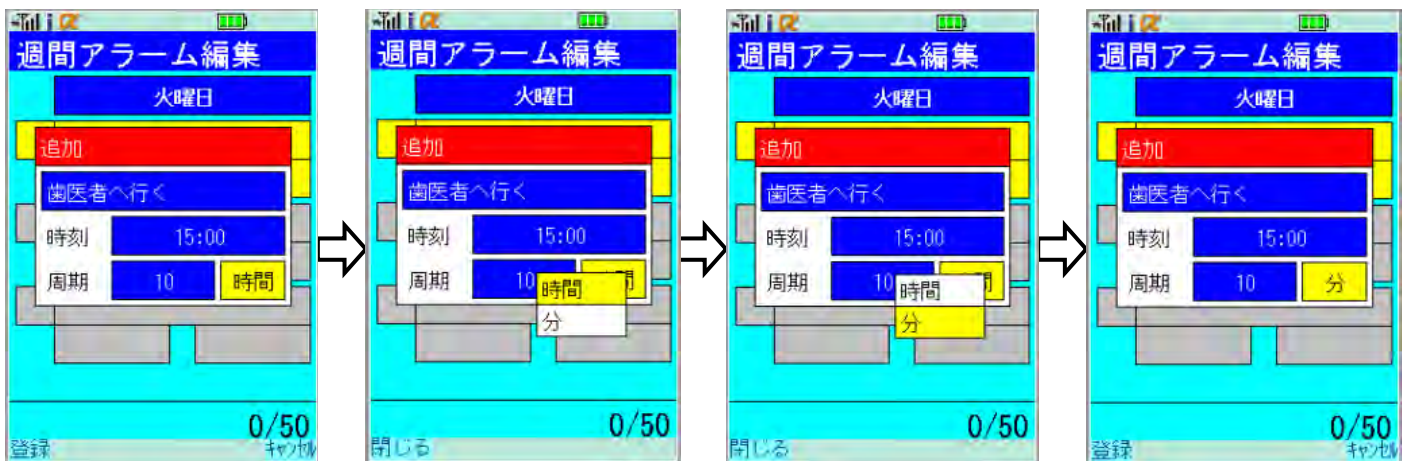

決定ボタンを押す



下ボタンを押し「分」を
選択する





決定ボタンを押す



入力内容が反映されるので、**左上ボタン**を押し、
登録内容を確認する

6. 週間アラームの削除

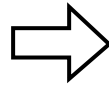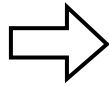



削除したい週間アラームを選び、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**上下ボタン**を押す



「削除」を選択し、**決定ボタン**を押す

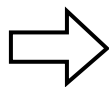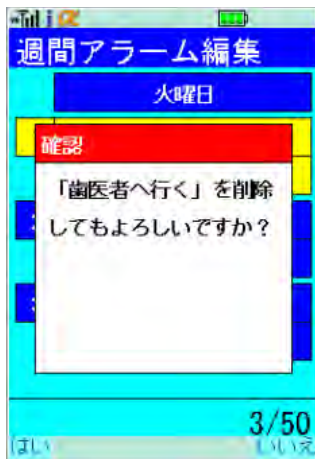

確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す

週間アラームが削除されているのを確認する

7. 週間アラームの全削除





週間アラームを削除したい曜
日を選び、左上ボタンを押す



メニューが開くので上下
ボタンを押す



「全削除」を選択し、決
定ボタンを押す

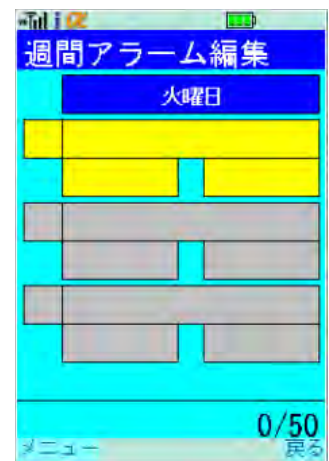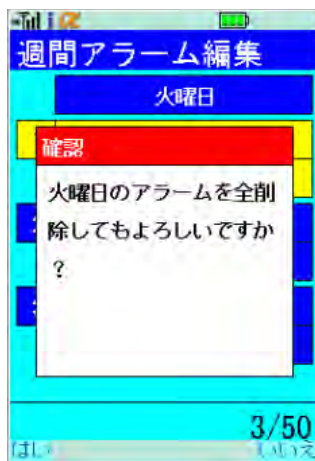


確認画面が表示されるので、
左上ボタンを押す



左上ボタンを押す

週間アラームが全て削除
されているのを確認する

8. 週間アラームの複写

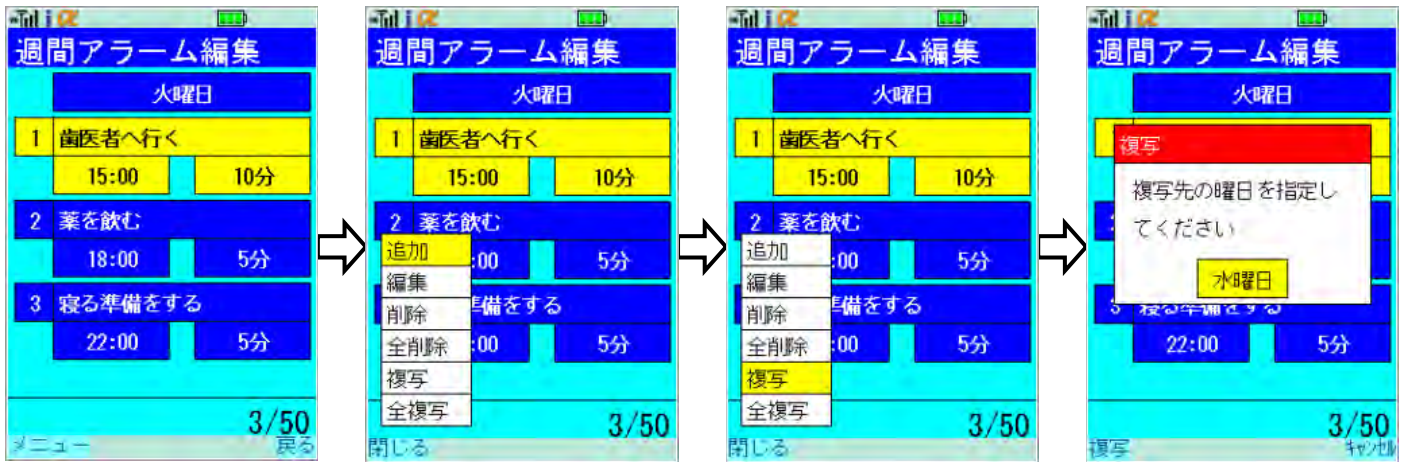

複写元となる週間アラームを選び、**左上ボタン**を押す



メニューが開くので**上下ボタン**を押す



「複製」を選び**決定ボタン**を押す



決定ボタンを押して曜日一覧を表示する




曜日一覧が表示されるので、**上下ボタン**で複写先を選び**決定ボタン**を押す



決定ボタンを押す




確認画面が表示されるので、**左上ボタン**を押す

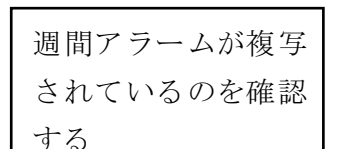

週間アラームが複写されているのを確認する

9. 週間アラームの全複写

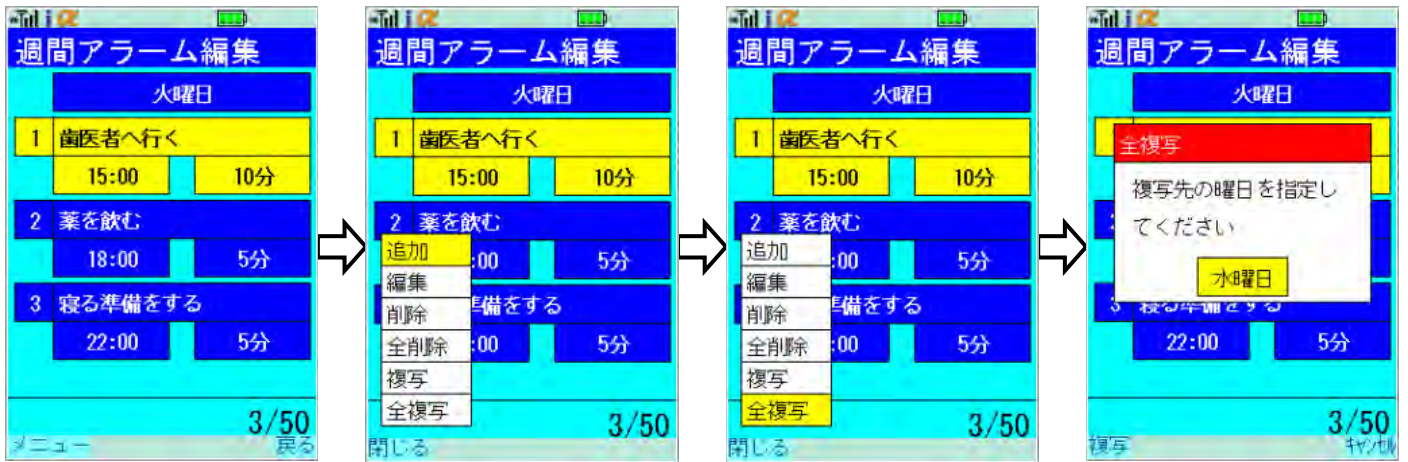

週間アラームを複写したい曜日を選び、左上ボタンを押す




メニューが開くので上下ボタンを押す




「全複写」を選び決定ボタンを押す




決定ボタンを押して曜日一覧を表示する

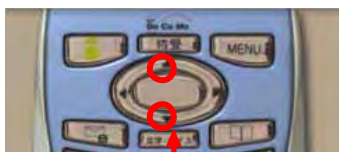


曜日一覧が表示されるので、上下ボタンで複写先を選び決定ボタンを押す

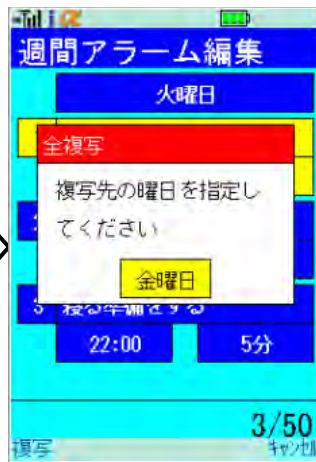

決定ボタンを押す



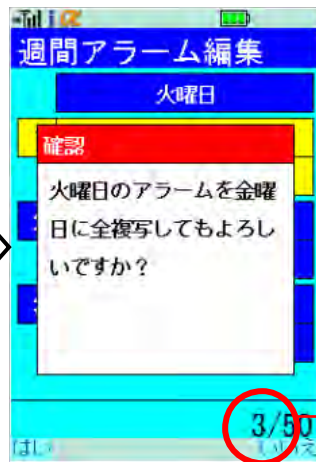


確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す

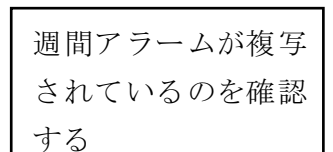

週間アラームが複写されているのを確認する

10. 週間アラームを適用する期間を設定

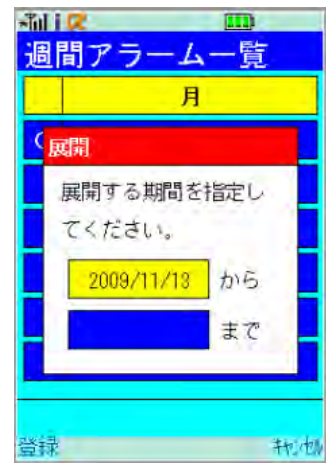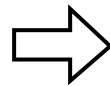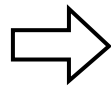





入力内容を確認し、
右上ボタンを押す



左上ボタンを押す




決定ボタンを押す

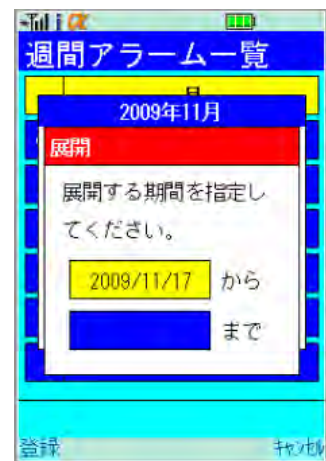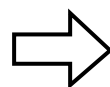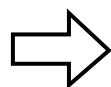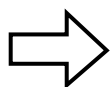




カレンダーが表示されるので、
十字ボタンでアラームを開始する日を選択する



決定ボタンを押す

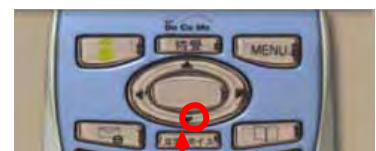

内容を確認し、
下ボタンで次の操作へ進む

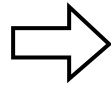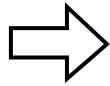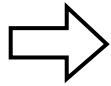





決定ボタンを押す



カレンダーが表示されるので、十字ボタンでアラームを終了する日を選択する



決定ボタンを押す

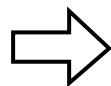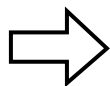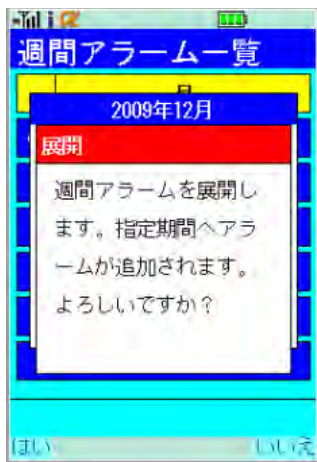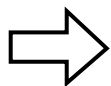

左上ボタンを押す






確認画面が表示されるので、左上ボタンを押す



曜日選択画面に戻るので、右上ボタンを押す

1 1. 設定した週間アラーム内容の保存

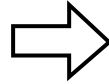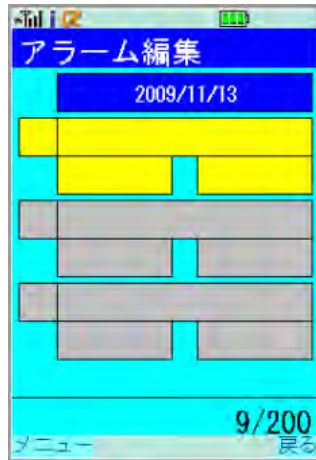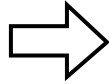


初めの画面にもどるので、**左上ボタン**を押す



右上ボタンを押して登録する

(4) 「送信先登録」のしかた

1. 送信先登録の起動

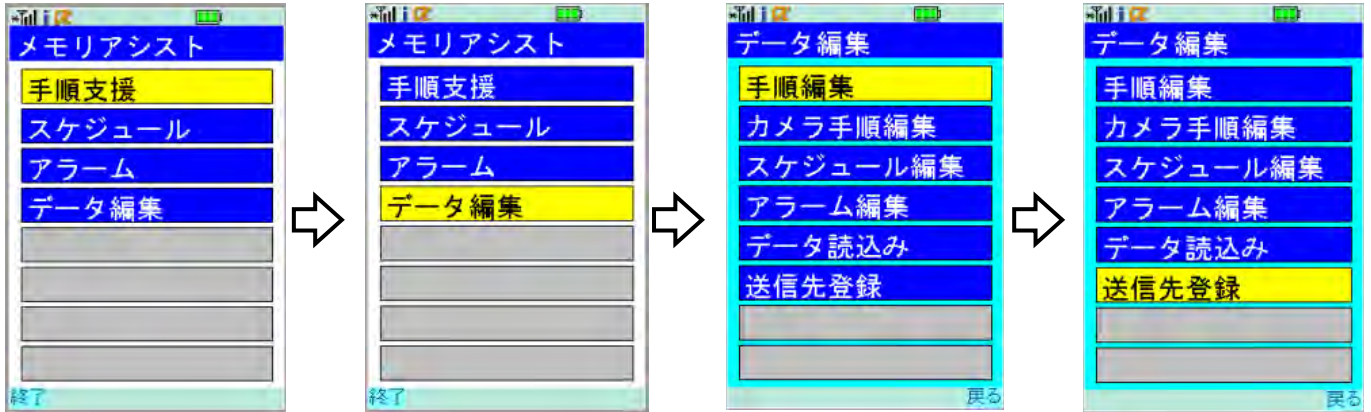

① 下ボタンを押し「データ編集」を選択する



② 決定ボタンを押す




③ 下ボタンを押し「送信先登録」を選択する



④ 決定ボタンを押す

2. 送信先の設定

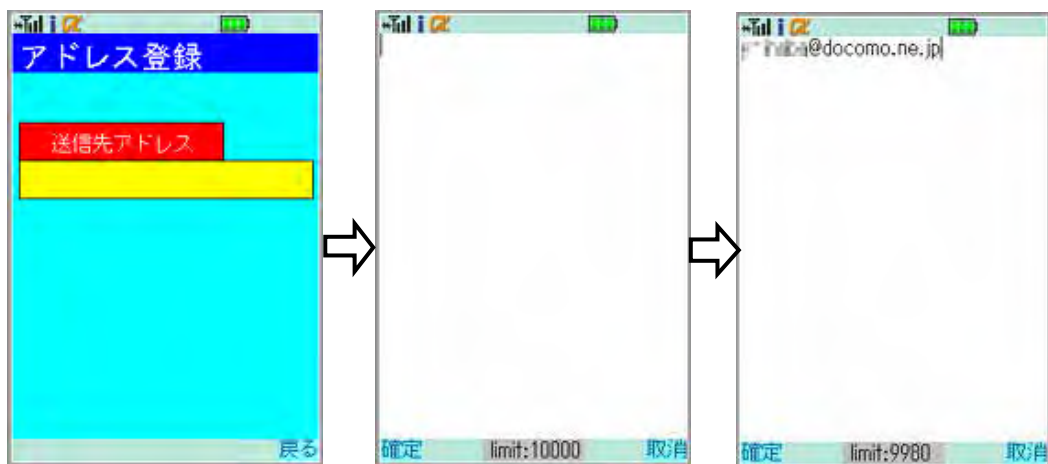


決定ボタンを押す



文字キーでメールアドレスを入力



入力内容を確認し、決定ボタンを押す

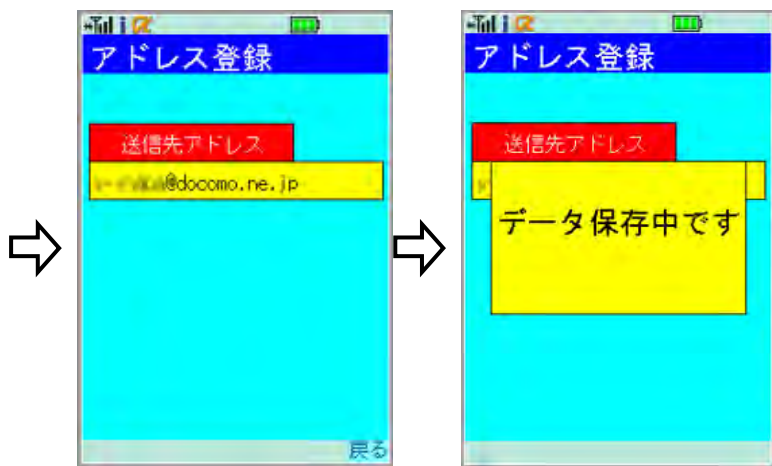

右上ボタンを押す

数秒「データ保存中です」の画面が表示された後、データが保存(登録)される